

病院・施設用3モーター式電動ベッド

GHB-V383

【取扱説明書】



GHB-V383-SW



GHB-V383-S



GHB-V383-W

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
組立、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き
正しくご使用頂きますようお願い致します。
なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管下さい。



—商品に関してのお問い合わせは下記へ—



0120-77-3433

(平日AM9:00~PM5:00)


もくじ

ページ

商品の特長	1
安全にご使用いただくために	2~4
主要部分の名称	5
組み立て方法	6~8
ご使用方法	9
オプションの取り付け	10
非常用バッテリーについて	11
故障かな!?・点検・お手入れ	12
商品の仕様	13
保証書	裏表紙

商品の特長

- 垂直昇降なので、壁にピタッと付けて設置する事ができます
- リモコンのボタンを押すだけで、背部・脚部・背脚連動・床面高さの上げ下げができます。(無段階自在式)
- マットレス適合寸法 通常83cm幅をワイドマット対応アジャスターを使用する事で最大91cm幅まで可能になります。(オプション)
- ベッドの床面の高さは35cm～68cmまで無段階に調整できます。

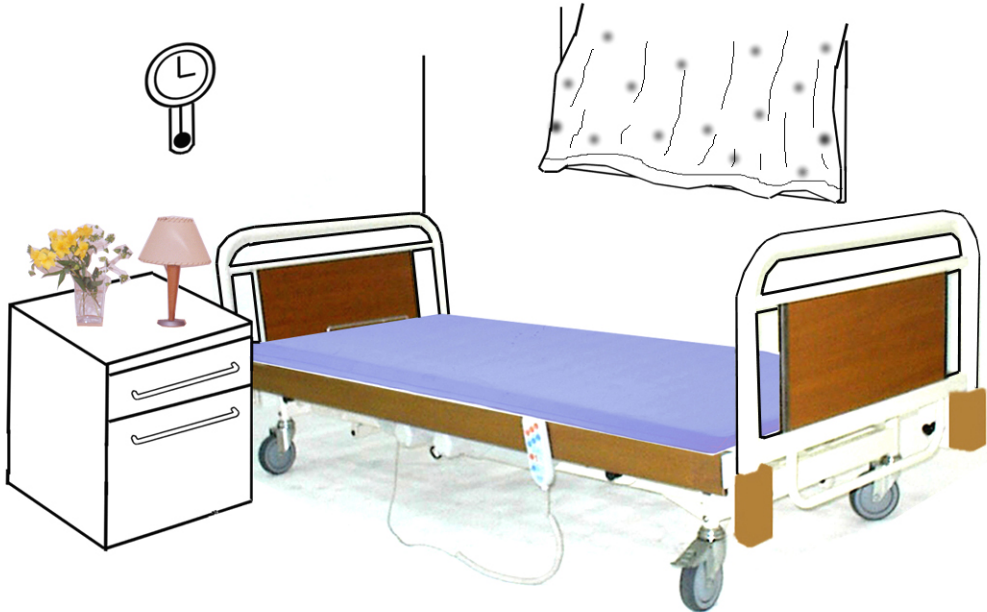

安全にご使用いただくために

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示とそれぞれの意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みいただき、正しくお使い下さい。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示の例



この記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。近くに具体的な注意内容が表示されています。



この記号は特定しない一般的な禁止行為であることを告げるものです。近くに具体的な禁止内容の説明が表示されています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図中または近くに具体的な禁止内容（分解禁止等）が表示されています。

GHB-V383（病院施設用 3モーター式電動ベッド）に関する警告及び注意



警告



身体の不自由な方や、意思表示のできない方がご使用になる時は、付添いの方が操作してあげて下さい。●操作ミスは大きな事故につながります。



操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。●ベッドに立った状態での操作は危険を伴うと同時に、モーターのトラブルの原因になります。



指づめにご注意下さい。
●危険防止のために注意箇所にステッカーを貼ってあります。



ご使用になられる前に、各部ボルトが完全に固定されているか、ご確認下さい。
●ボルトがゆるんでいると、ご使用中にパーツが外れたりすることも考えられ、事故の原因になります。

 **警告**



ベッドの上で跳びはねたり、ベッドの下にもぐり込まないで下さい。
●ネット部分の損傷やフレームにはさまれる等の事故につながります。



ベッドの上で跳びはねたり、ベッドの下にもぐり込まないで下さい。
●ネット部分の損傷やフレームにはさまる等の事故につながります。



背上げ、脚上げ箇所に物が挟まっていないか点検下さい。
●物が挟まったままの状態で作動させますと、安全スイッチが働かず故障の原因になります。



モーターの長時間連続使用（5分以上）はなさらないで下さい。
●モーターの過熱により、火災や感電の原因になります。



ストーブなどの火気類をベッドに近づけ過ぎないで下さい。
●火災の原因になります。



電源コンセントは濡れた手で触らないで下さい。また、コードを抜く時は必ずコンセントを持って抜いて下さい。●感電等の危険があります。



雷が鳴った時はコンセントを抜いて下さい。
●感電の恐れがあります。



運表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧では使用しないで下さい。
●火災や感電の原因になります。



ペースメーカーをご使用中の方、電子機器による治療を行っておられる方のご使用は出来ません。●モーターのノイズの影響で、ペースメーカー等に支障をきたす可能性があります。



水などの液体で、手元スイッチや駆動部を濡らさないで下さい。
●ショートして火災や感電の原因になります。



分解や改造はしないで下さい。
●火災や感電の原因になります。



背部フレームに腰かけたり、うつ伏せに寝ている状態でベッドを作動させないで下さい。



 **注意**



ベッドの下に物を置かないで下さい。
●作動不良によるトラブルの原因になります。



手元スイッチおよびコードの根元を極端に折りまげないで下さい。
●ショートの原因になります。



ベッドを2人以上でご使用にならないで下さい。



モーター作動中にテレビ等にノイズが発生することがございます。
予めご了承下さい。



ベッド移動時に左右フレームを持ち上げたり引っ張ったりしないで下さい。
●移動の際は、前後宮を持って移動して下さい。

主要部分の名称

GHB-V383-SW

ヘッドボード

・ロックピンの操作で
取り外しができます。

リモコン

・背・脚・ベッドの高さの調節が出来ます。
裏面についてるフックで使いやすい
場所に掛けて下さい。

フットボード

・ロックピンの操作で
取り外しができます。

オプション取付け穴 (片側5ヶ所)

・ベッドサイドガード、介助バーなどを
取付けられます。

本体ユニット

サイドフレーム

スチール製キャスター

GHB-V383-W

リモコン

ヘッドボード

サイドフレーム

フットボード

本体ユニット

強化樹脂製キャスター

オプション取付け穴 (片側5ヶ所)

GHB-V383-S

リモコン

フットボード

ヘッドボード

オプション取付け穴 (片側5ヶ所)

本体ユニット

サイドフレーム

スチール製キャスター

組み立て方法


① キャスターの取り付け

お知らせ

昇降部は、キャスターの取り付けをしやすい為、梱包箱の中で上下逆にして入れております。そのまま箱から出してキャスターを取り付けて下さい。

お願い


ストッパー付きのキャスターが対角線になるように取り付けて下さい。

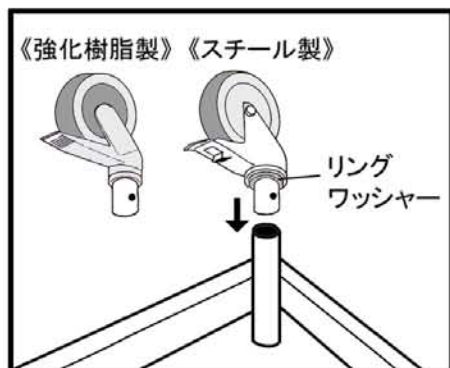

キャスターに取り付け済みのボルト・ワッシャーを外し、昇降部のキャスター取り付け穴に入れ込みます。その際、ボルトを入れる穴を合わせて下さい。

確認


スチール製のみ、キャスターにリングワッシャーが装着されている事をご確認下さい。

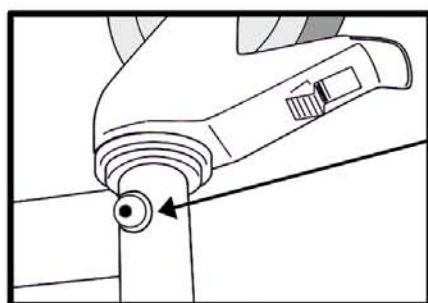


六角レンチを使い、ボルト・ワッシャーでキャスターを固定します。

キャスターの取り付け完了後、昇降部を上下もとに戻してキャスターをロックします。

《スチール製》

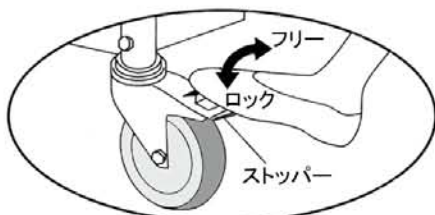

《強化樹脂製》

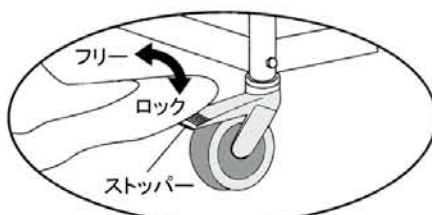

警告


！ ベッドを移動するとき以外は、ストッパーを踏み込んで、ブレーキをかけて下さい。ご使用の方が乗り降りする際に危険です。

組み立て方法

お願い

組み立ては二人以上で行なって下さい。


② 本体ユニットを昇降部に取り付ける。

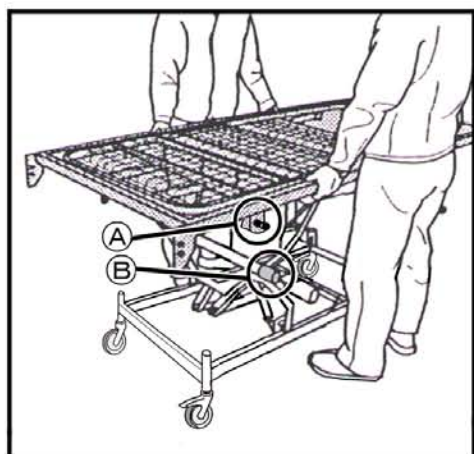

本体ユニットのⒶ部(4ヶ所)を昇降部のⒷ部(各4ヶ所)の上に乗せます。

確認

※ユニット面に添付されている頭・足シールで、方向を御確認の上、本体ユニットを取り付けて下さい。

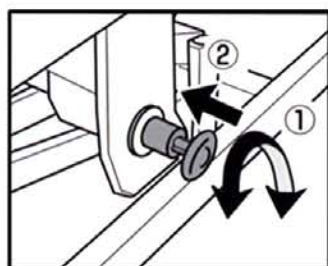


- ① 回す
- ② 押し込む

4ヶ所のユニット取り付け部分を回転ロックピンで固定します。

確認

※昇降部にプラスチックキャップが装着されている事をご確認下さい。

③ サイドフレームを取り付ける。

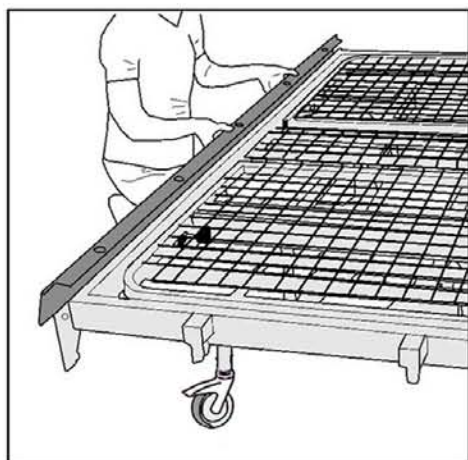


サイドフレームを、まず上からはめ込み側面を内側に押します。

★この際、頭側・脚側を片方ずつ押し込むと、楽に取り付けが出来ます。
(外す時も同様です。)



組み立て方法

④ ヘッド・フットボードを取り付ける。

《GHB-V383-W 装着例》

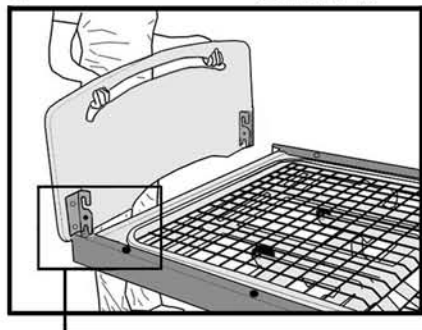

ボードのフックをユニットの突起に引っ掛ける。

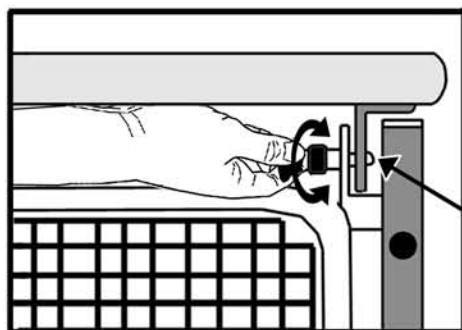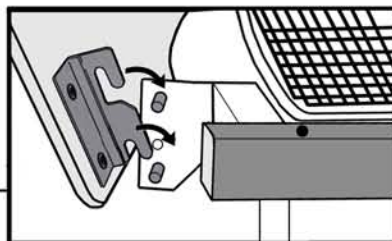


回転ロックピンを回して押し込んで、固定します。

確認

固定した後、このピンが出ている事を確認して下さい。

⑤ マットレス止めを取り付ける。

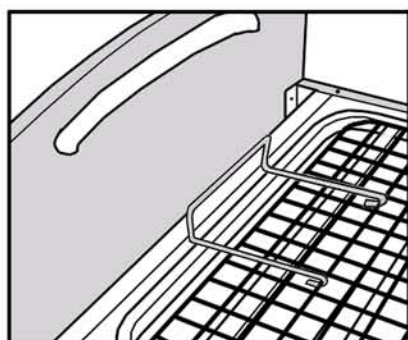

マットレス止めをフットボード側のネットに引っ掛けて取り付けます。



組み立て完成 !!

御使用方法

ご注意とお願い

- ベッドに立った状態でのモーターの作動は絶対になさらないで下さい。
- お客様のご使用上のミスにて発生したトラブルに関しては、責任を負いかねます。

① 電源を入れる。

(電源コードをコンセントに接続して下さい。)


ご注意

使用電源は家庭用100Vです。
危険ですのでたこ足配線はしないで下さい。


② リモコンスイッチで操作する。

- このリモコンは電動無段階自在式の4ポイント（背部・脚部・背脚部同時・床面高さ）選択タイプです。
- 同時に2つ以上のボタンを押すと故障しますので絶対にしないで下さい。
- 操作スイッチを押すと、パイロットランプが緑色に点灯します。

パイロットランプ

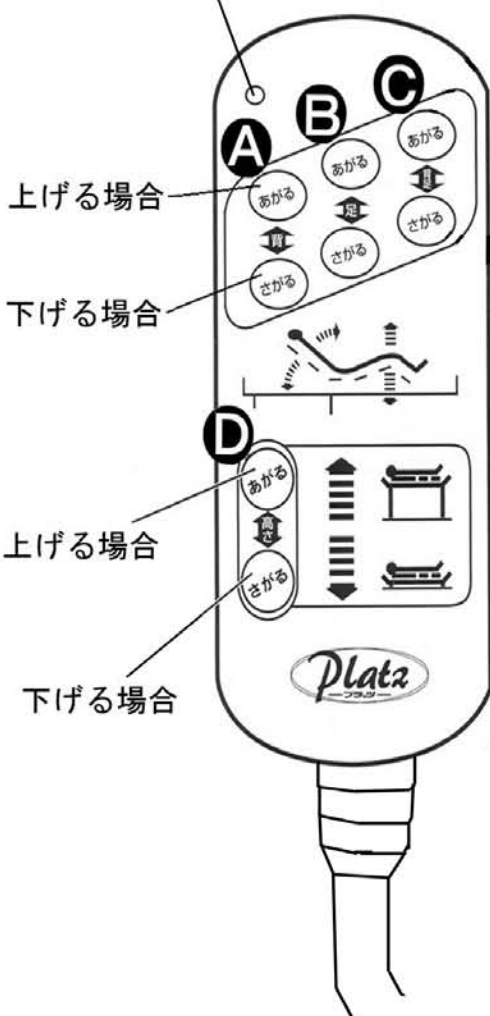


A 背…背部ユニットの角度調節ボタン

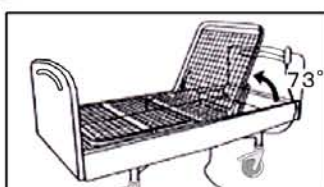


背部ユニットの角度を73°(±3°)まで、無段階調節が出来ます

B 足…脚部ユニットの角度調節ボタン

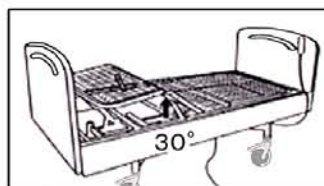


脚部ユニットの角度を30°(±3°)まで、無段階調節が出来ます。

C 背・足…背・脚部ユニットの同時角度調節ボタン

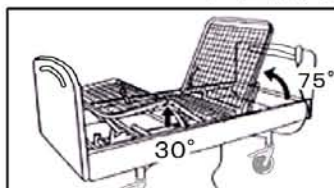


背部・脚部ユニットの角度を同時に無段階調節が出来ます。

D 高さ…ベッドの高さ調節ボタン

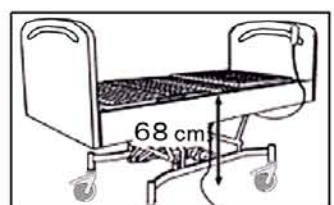

ベッド(床面)の高さを35~68 cmまで無段階調節が出来ます。

オプションの取り付け

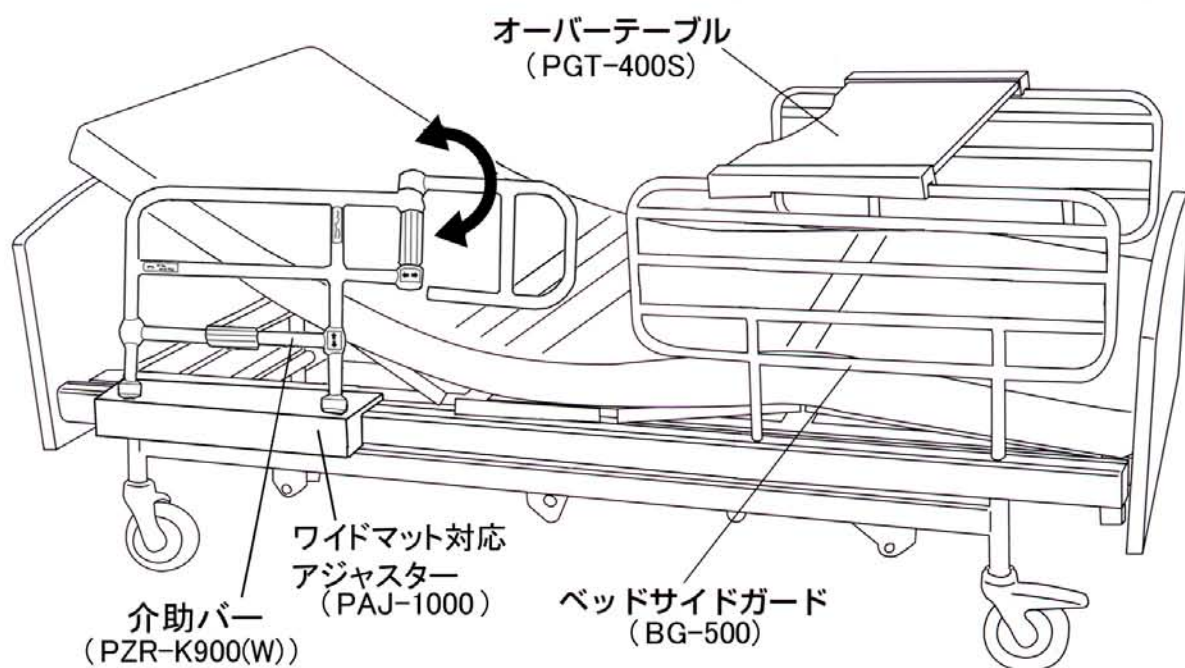

ワイドマット対応アジャスターについて

ワイドマット対応アジャスターは、91cm幅のマットをご使用の際にベッドサイドガードや介助バーを取り付ける為のものです。

介助バーについて

介助バーは、ベッドの乗り降りの補助を目的としています。グリップを回すだけで簡単にアーム角度の調節ができます。オプション取り付け穴に差しこんで使用して下さい。

ベッドサイドガードについて

ベッドサイドガードは、転落防止、寝具の落下防止を目的としています。オプション取り付け穴に差し込んで使用して下さい。

オーバーテーブルについて

オーバーテーブルは、Gシリーズ専用のものをお使い下さい。オーバーテーブルはベッドサイドガードの上に乗せて使用して下さい。

⚠ 注意



- オーバーテーブルに重いものを乗せたままにしたり、高温のもの（やかん等）を置かないで下さい。変色・変形を生じることがあります。

非常用バッテリーについて

- この商品には、センターユニットに装着済みのモーターに、停電時の非常時に備え、非常用バッテリーが備わっています。（アルカリマンガン9V電池使用）
- 停電時にリモコン操作で背・脚部を下げて寝かせる事が可能です。（1回のみ可能、上に上げる事は出来ません。）
- 未使用の場合でも、年2・3回の交換をお勧めします。

注意 コンセントを抜いたまま使用されますと、電池より電気が供給されてしまい、電池の交換が必要になります。


電池の交換方法

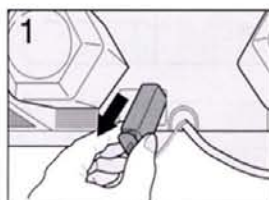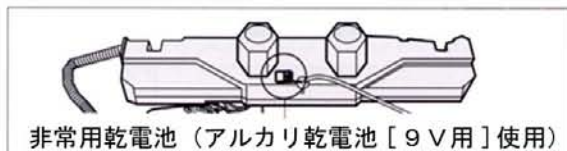


モーターユニットより非常用乾電池を取り出します。



コネクターを指でつまみ乾電池を外します。

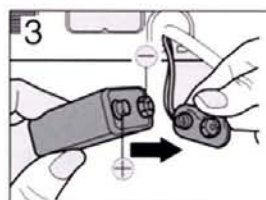

新しい乾電池をコネクターに取り付けます。非常用乾電池 ⊕ と ⊖ を正しくセットします。

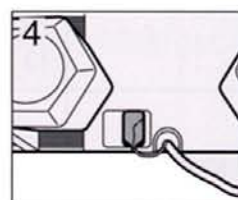

非常用乾電池をモーターユニットに取り付けます。

確認

出荷時に装着しております乾電池は、テスト用のモニター電池です。1～2回程度の使用しか出来ませんので、念の為、市販の乾電池を予備として御購入下さい。

故障かな・・・!?

下記項目で確認して下さい。

- 電源プラグが抜けていませんか？
⇒ 電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込んで下さい。
- 電源プラグが破損していませんか？
⇒ 販売店にご相談下さい。
- リモコンコードが抜けていませんか？
⇒ リモコンのコネクターをモーターユニットの差込口に差し込んで下さい。
- 停電してませんか？
- ブレーカーがとんでいませんか？

次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼いただくか、上記フリーダイヤルまでご連絡下さい。

症状		対処方法	ページ
リモコンスイッチを押しても動かない	上ながら 緑ランプが点灯する	●連続使用しましたか？ ⇒ トランス保護用の温度スイッチが働いた可能性があります。電源コードを抜いて30分～1時間冷まして下さい。	——
	下ながら	●モーターユニットの故障と思われます。 ⇒ 販売店にご相談下さい。	——
	上下しない 緑ランプが点灯しない	●補助乾電池がありません。 ⇒ 9Vの補助乾電池を交換して下さい。 ●モーターユニットか、リモコンが故障しています。 ⇒ 販売店にご相談下さい。	⑪ 参照
途中で操作が停まる	●ベッドの下や後ろに障害物がありませんか？ ⇒ 障害物を取り除いて下さい。	——	

点検・お手入れ

- 本体のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いて下さい。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用下さい。磨き粉などは使用しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検して下さい。
- 電動モーター周辺の駆動部は、時々ハケやブラシで掃除して下さい。

商品の仕様

家庭用品品質表示に基づく表示および乙種電気用品（電動ベッド）の表示

品番	GHB-V383-SW	GHB-V383-W	GHB-V383-S
品名	病院・施設用3モーター式電動ベッド		
材質	ヘッドフット部： スチール(紛体焼付塗装) 木(MDFメラミン仕上げ) コーナーバンパー・サイドフレーム： プラスチック樹脂	ヘッドフット部： MDFメラミン仕上げ サイドフレーム： プラスチック樹脂	ヘッドフット部： スチール(紛体焼付塗装) コーナーバンパー・サイドフレーム： プラスチック樹脂
電動機能	無段階自在式、4ポイント選択タイプ 背上げ／上下単独、脚上げ／上下単独、背脚同時連動、高さ調節／上下単独		
床面形状	スチールメッシュ方式(4ブロック) 背上げ角度(0～73度±3度)、脚上げ角度(0～30度±3度)		
定格電圧	AC100V 50/60Hz	定格消費電力	100V/100W
モーターユニット	オキン(ドイツ)製(通産省乙種電気用品輸入承認済) モーター部に非常用電源(9V電池)採用		
キャスター	φ125mm 幅28mm キャスター(スチール製・強化樹脂製)		
定格使用時間	連続使用5分(一人での使用に限定)	耐荷重	150kg
ベッド寸法 (mm)			
マットレス 適合寸法	83cm幅 ワイドマット対応アジャスター(オプション)装着時:91cm幅		
商品梱包	1/3: 本体ユニット・取扱説明書・マットレス止め 2/3: 昇降部 3/3: ヘッドボード・フットボード	サイドフレーム キャスター	
梱包サイズ 商品重量 (本体重量)	梱包 1/3: 2050 × 930 × 185 (mm) … 50kg (45kg) 梱包 2/3: 1815 × 820 × 335 (mm) … 41kg (36kg) 梱包 3/3: 945 × 605 × 150 (mm) … 16kg (14kg)		
原産国	本体フレーム: 台湾		モーターユニット: ドイツ
表示者	(株) プラッツ フリーダイヤル: 0120-77-3433 (月曜～金曜)		

■アフターサービスについて

お客様保管用です

- この電動ベッドには保証書を添付致しております。「販売店、購入日、お名前」等を記入した上で、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管しておいて下さい。
- 保証期間はご購入日から1年間です。
- サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読み下さい。それでも異常がある場合は、上記フリーダイヤルへご相談下さい。その際製品名、故障内容をお申し付け下さい。
- その他のアフターサービスについてご不明な点がございましたら、当社または販売店へお申し付け下さい。（平日AM 9:00～PM 5:00）

病院・施設用3モーター式電動ベッド

保証書

ロットNo.

保証期間	対象部分	期間（ご購入日より）
	本 体	1 年
ご購入日	年	月 日
お 客 様	ご住所	
	お名前 様	
	お電話 ()	

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
 おご購入日から左記の期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、ご購入販売店に修理をご依頼下さい。

販売店

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は無料修理いたします。
 2. 保証期間内に故障して、修理をお受けになる場合には、ご購入の販売店にご依頼下さい。修理のさいには本書をご提示下さい。修理は極力、部品交換をお願いします。もし出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) おご購入後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 4. (ホ) 本書の提示がない場合
 5. (ヘ) 本書におご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせ下さい。

■発売元

株式会社 **フレッツ**

〒 816-0921
 福岡県大野城市仲畑
 2丁目 8-28

—商品に関してのお問い合わせは下記へ—

フリーダイヤル **0120-77-3433**