




PKB-9シリーズ用後付け昇降機

PKB-UDS12

【取扱説明書】

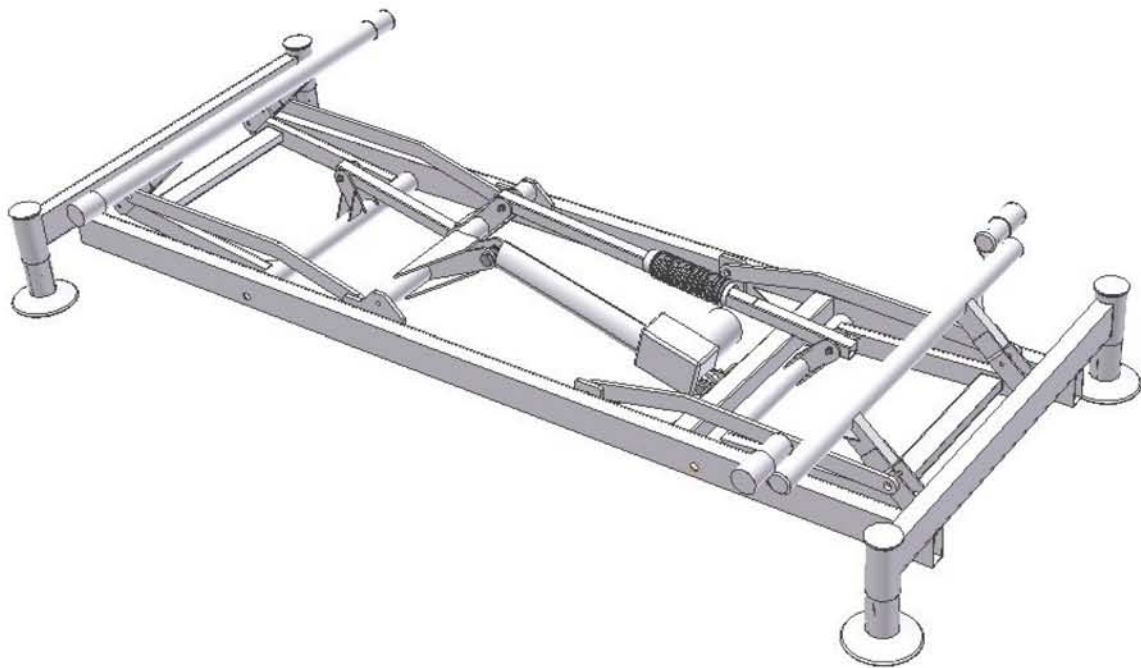

この度は、PKB-9シリーズ用後付け昇降機をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、組み立て、ご使用前に必ずお読み頂き、正しくご使用頂きますようお願い致します。

- 介護が必要な方がお使いになる場合は、介護される方もこの取扱説明書を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管して下さい。
- 製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡し下さい。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社まで、お問い合わせ下さい。

もくじ

ページ

安全にご使用いただくために	②～④
部品の確認・主要部分の名称	⑤
昇降機の使用方法	⑥
昇降機の取り付け方法	⑦～⑩
故障かな・！？	⑪
商品の仕様	⑫
メモ用紙	⑬
保証書	⑭

対応機種

在宅介護用 1+1 モーターベッド
(PKB-9シリーズ)

商品の特長

- 1+1 モーター式ベッドに昇降機を後付けする事で、
垂直昇降機能付き3モーターベッドへ早変わり！！
- 昇降機を後付けする事により、介護する方の腰痛を防止します。
- 安定が良いので、安心してご使用頂けます。



安全にご使用いただくために

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示とそれぞれの意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みいただき、正しくお使い下さい。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。近くに具体的な注意内容が表示されています。



この記号は特定しない一般的な禁止行為であることを告げるものです。近くに具体的な禁止内容の説明が表示されています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図中または近くに具体的な禁止内容（分解禁止等）が表示されています。

PZB-2/PKB-7シリーズ用後付け昇降機に関する警告及び注意



警告



身体の不自由な方や、意思表示のできない方がご使用になる時は、付添いの方が操作してあげて下さい。●操作ミスは大きな事故につながります。



操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。●ベッドに立った状態での操作は危険を伴うと同時に、モーターのトラブルの原因になります。





指づめにご注意下さい。





ご使用になる前に、各部ボルトが完全に固定されているか、ご確認下さい。
●ボルトがゆるんでいると、ご使用中にパーツが外れたりすることも考えられ、事故の原因になります。


 **警告**


 ベッドの上で飛びはねたり、ベッドの下にもぐり込まないで下さい。
●ネット部分の損傷やフレームにはさまれる等の事故につながります。


 モーターの長時間連続使用（5分以上）はなさないで下さい。
●モーターの過熱により、火災や感電の原因になります。


 ストーブなどの火気類をベッドに近づけ過ぎないで下さい。
●火災の原因になります。


 電源コンセントは濡れた手で触らないで下さい。また、コードを抜く時は必ずコンセントを持って抜いて下さい。●感電等の危険があります。

 雷が鳴った時はコンセントを抜いて下さい。
●感電の恐れがあります。


 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧では使用しないで下さい。
●火災や感電の原因になります。


 ペースメーカーをご使用の方、電子機器による治療を行っておられる方は、通常のベッドの使用には支障はきたしません。が、心臓部をモーターに近づける様な事はしないで下さい。


 水などの液体で、手元スイッチや駆動部を濡らさないで下さい。
●ショートして火災や感電の原因になります。


 分解や改造はしないで下さい。
●火災や感電の原因になります。

 **注意**

 昇降機の下に物を置かないで下さい。
●作動不良によるトラブルの原因になります。

 手元スイッチおよびコードの根元を極端に折りまげないで下さい。
●ショートの原因になります。


 ベッドを2人以上でご使用にならないで下さい。

 モーター作動中にテレビ等にノイズが発生することがございます。
予めご了承下さい。


部品の確認

●開梱した時点で、下記の部品が全て同梱されているか、また、破損していないか確認して下さい。
 万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社まで御連絡下さい。


■ 後付け昇降機 …………… 1台




■ リモコン …………… 1個




■ スパナ …… 1個 ■ 回転ロックピン …… 4個

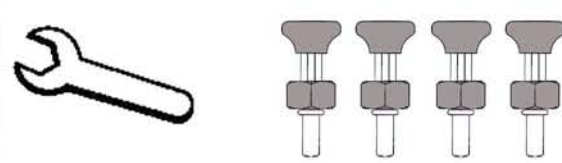

■ 取扱説明書 …………… 1冊



主要部分の名称

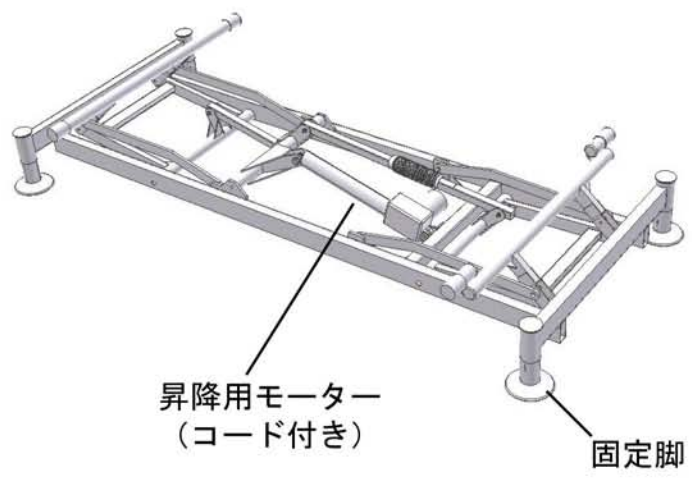

昇降機の使用法




警告



ベッドを一定期間使用しない場合や、介護者が長時間ベッドから離れる場合は、電源プラグを抜いて下さい。
誤操作による事故のおそれがあります。

- ① ベッドの電源プラグをコンセントに差し込む。
- ② リモコンで操作する。

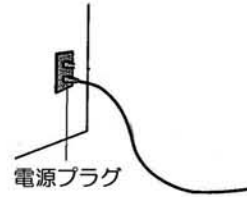

A 高さを上げるボタン




床面高を 59 cm まで
無段階で上げる事が出来ます。

B 高さを下げるボタン



床面高を 25 cm まで
無段階で下げる事が出来ます。

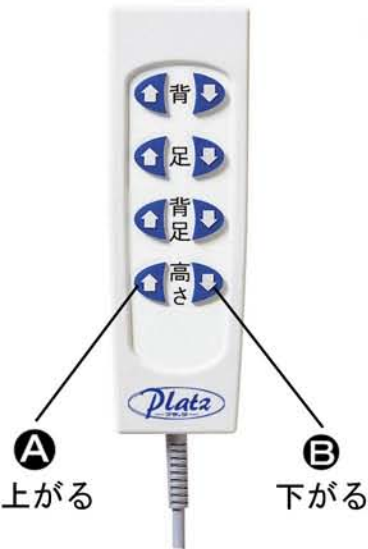

注意



操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。
ベッドに立った状態での操作は危険を伴うと同時に、モーターのトラブルの原因になります。



「あがる」と「さがる」ボタンを同時に押さないで下さい。
リモコンまたはモーターの故障の原因になります。



たこ足配線はしないで下さい。
使用電源は家庭用 100 V です。
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。


昇降機の取り付け方法

お願い


- 2人以上で行って下さい。

まず、ベッドを一部分解し昇降機の上に乗せた後、再度ベッドを組み立てます。


- ① ヘッド・フットボードを取り外します。
回転ロックピンを回して引き抜きます。

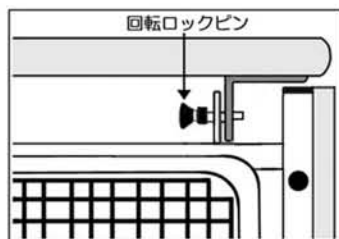

- ② ヘッド・フットボードを本体ユニットから外します。

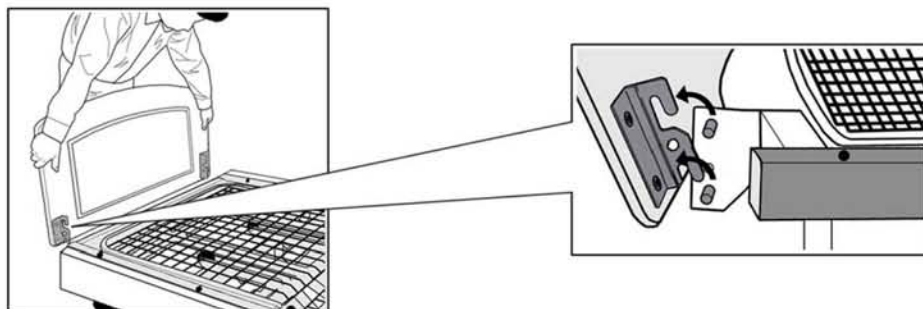


- ③ サイドフレームを取り外します。

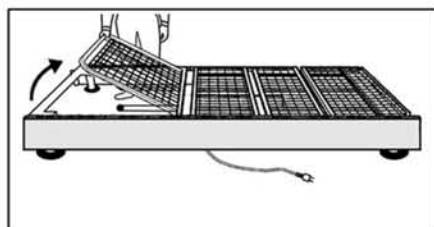


一人が背ネットを上にも少し上げます。

- ④ もう一人がスパナを使い、サイドフレーム取り付けビスに付いているワッシャとナットを外し、ビスを取り外します。

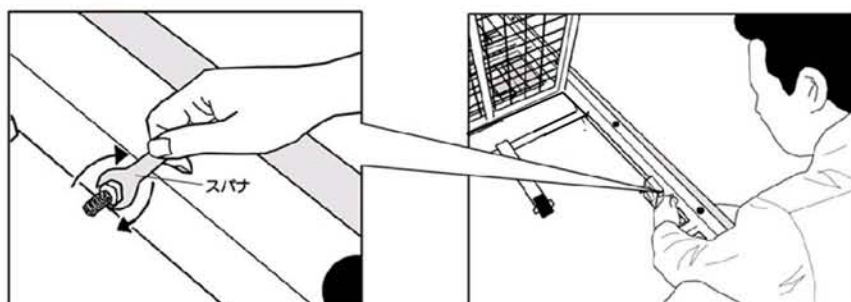


昇降機の取り付け方法


⑤ 足側も同様に外します。

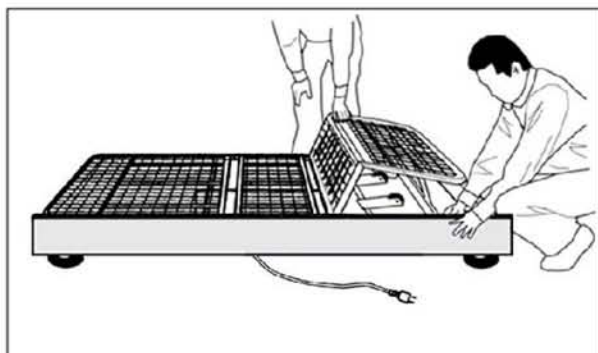



⑥ 2本のサイドフレームを取り外します。

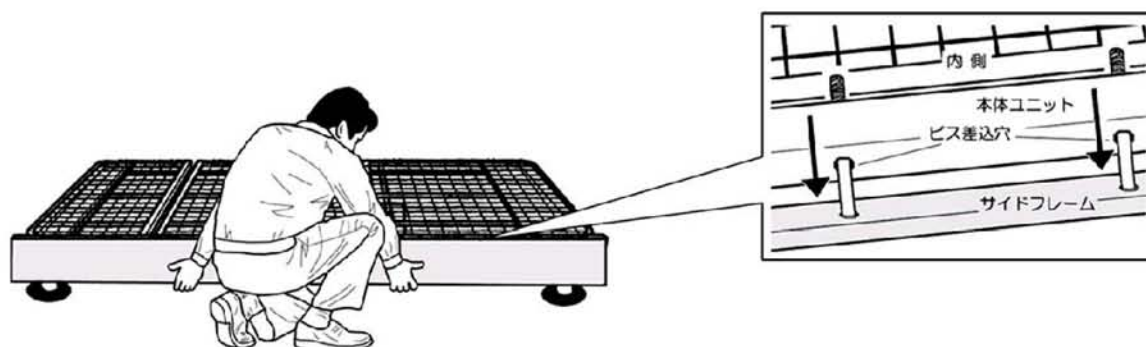

⑦ 本体ユニット □ 部の4箇所の黒キャップを外します。

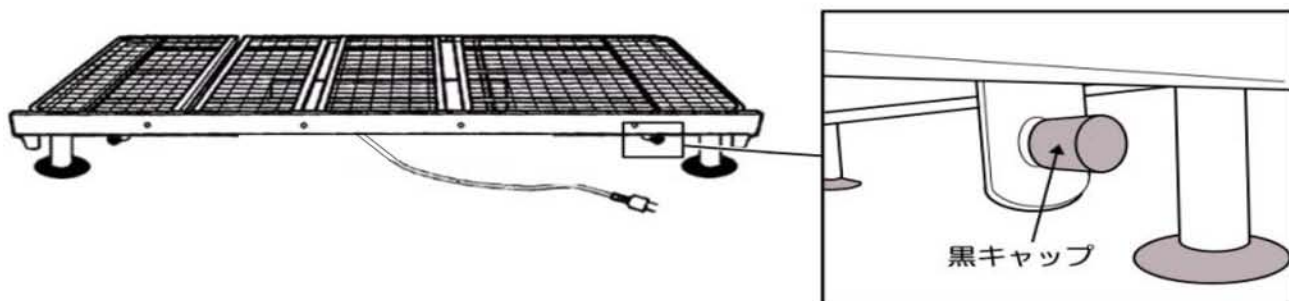


⑧ 黒キャップを外した箇所に、回転ロックピンをスパナで取り付けます。取り付けたら、回転ロックピンを外側に引き出します。

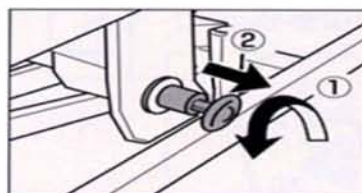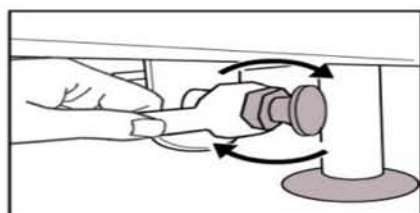

① 回す
② 引き出す

昇降機の取り付け方法

⑨ 本体ユニットを裏返して、固定脚がついた支柱を4本とも取り外します。

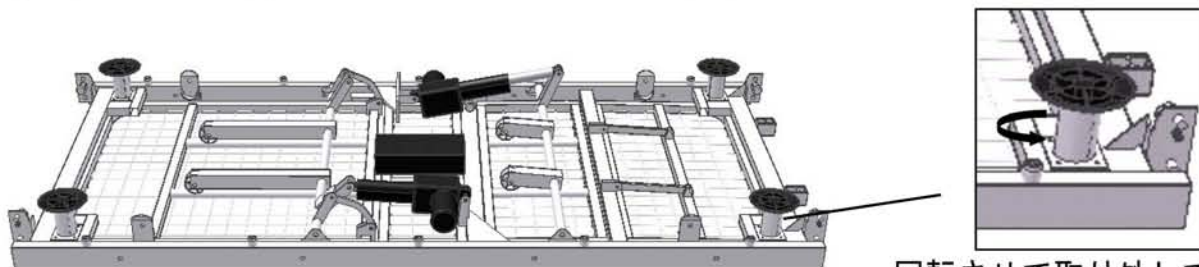

回転させて取り外してください。


⑩ 本体ユニットを昇降機の上に乗せます。

お願い



- 2人以上で行ってください。
- ネットの部分だけを持って上げないで下さい。
(外枠が下に開き、落下して危険です。)

確認

昇降機上面に添付されている「頭・足」シールをご確認の上、本体ユニットを乗せて下さい。

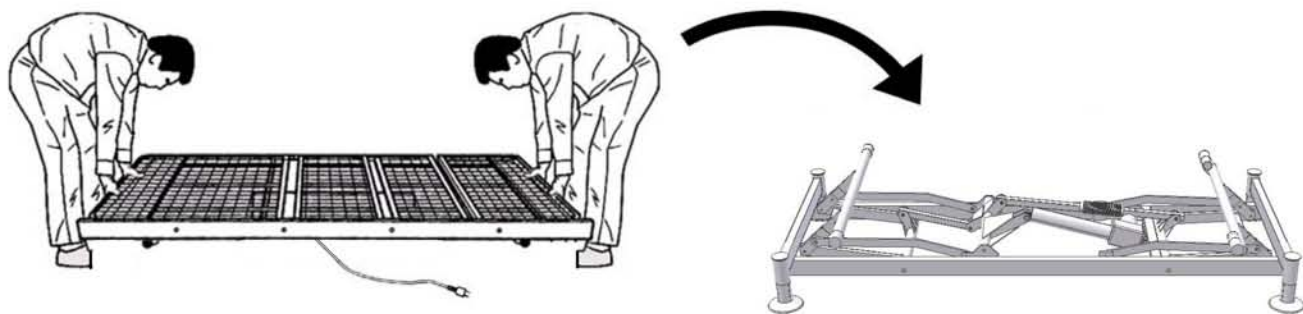


⑪ 本体ユニットの回転ロックピンを固定します。(4箇所あります)

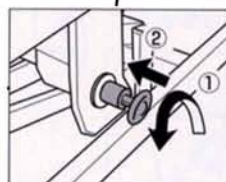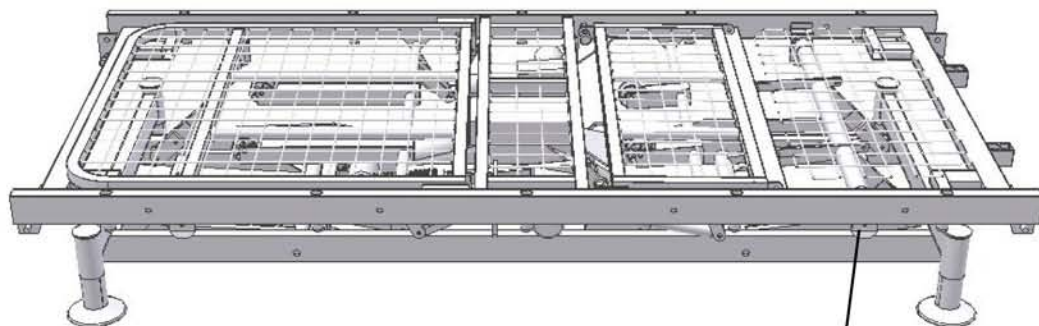


- ① 回す
- ② 押し込む

昇降機の取り付け方法

- ⑫昇降部のモーターコードとリモコンコードを、下図の様に本体ユニットのトランスに差込みます。

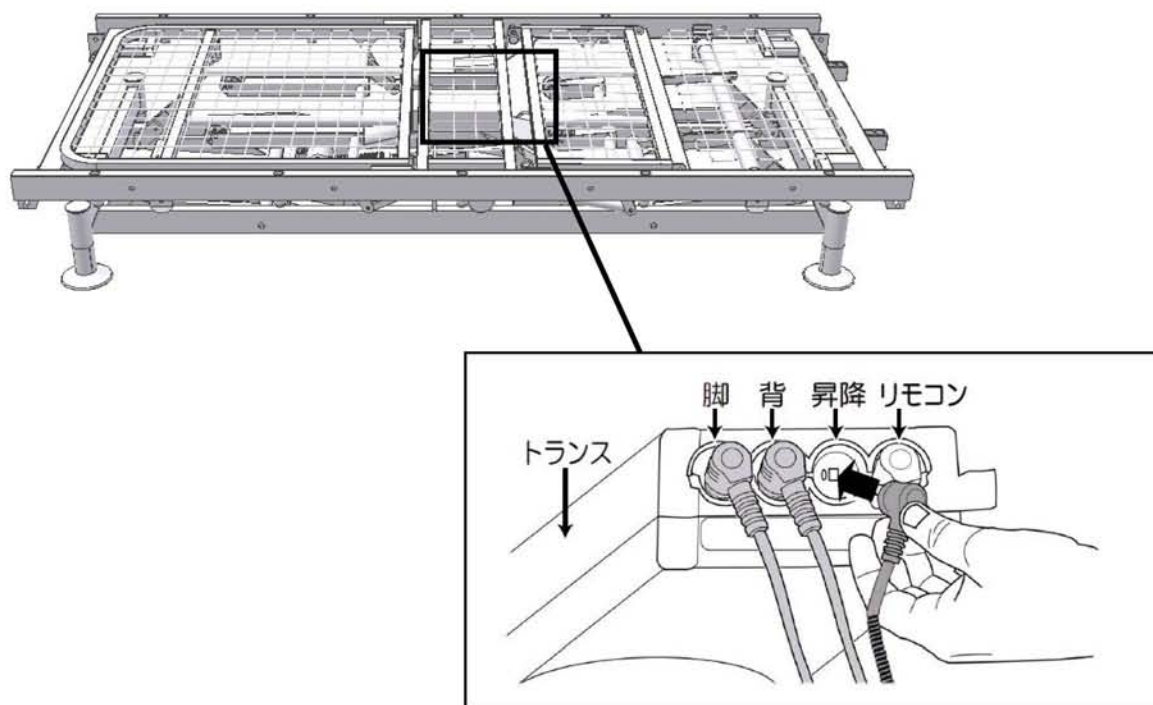

- ⑬本体ユニットと昇降機の取付けは、これで完成です。
ヘッドボード・フットボード・サイドフレームの取り付けは、取り外した逆の順序で
取付けるか、本体ユニットに付属の取扱説明書をご参照ください。

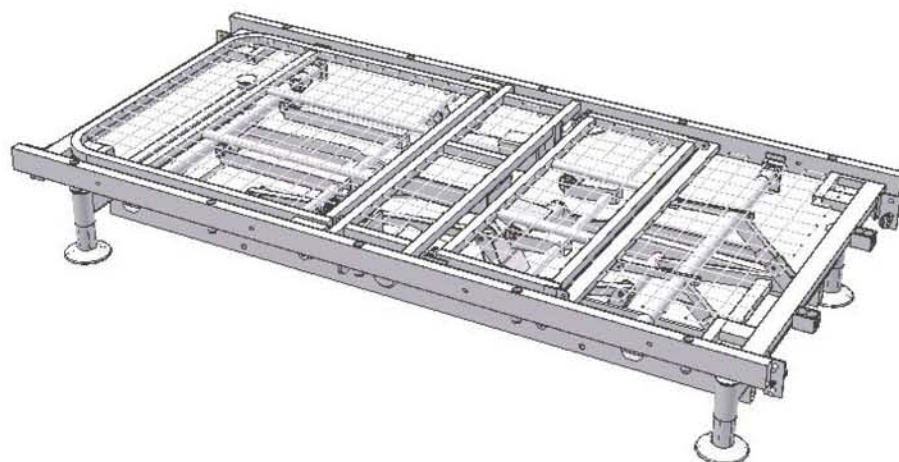

故障かな・・・！？

下記項目で確認してください。

- 電源プラグが抜けていませんか？
⇨ 電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込んで下さい。

- 電源プラグが破損していませんか？
⇨ 販売店にご相談下さい。


- リモコンコードが抜けていませんか？
⇨ リモコンのコネクターをモーターユニットの差込口に差し込んで下さい。

- 停電してませんか？
- ブレーカーがとんでいませんか？

点検・お手入れ

- 本体のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いて下さい。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用下さい。
アルコール・ベンジン・磨き粉などは使用しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検して下さい。
- 電動モーター周辺の駆動部は、時々ハケやブラシで掃除して下さい。

商品の仕様

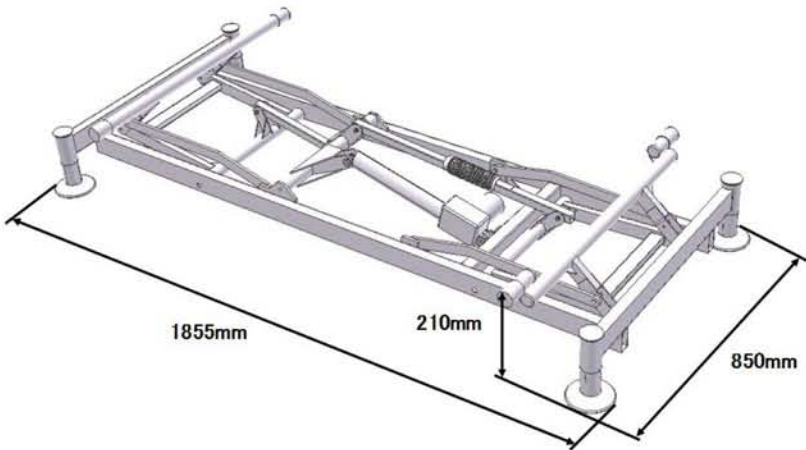	家庭用品品質表示に基づく表示
	PKB-UDS12
品名・品番	PKB-9シリーズ用後付け昇降機
ベッド寸法	
商品梱包	後付け昇降機
梱包サイズ 梱包重量 (本体重量)	1930X950X245 (mm) 54.0 kg (44.0 KG)
材質	スチールパイプ
電動機能	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	70W
モーターユニット	OKIN製(通産省乙種電器用品輸入承認済)
定格使用時間	連続使用5分 (一人での使用に限定)
耐荷重	90kg
原産国	本体:マレーシア モーター:ドイツ
表示者	(株)プラッツ フリーダイヤル:0120-77-3433(月曜～金曜 日祝日除く)

■アフターサービスについて

お客様保管用です

- この電動ベッドには保証書を添付致しております。「販売店、購入日、お名前」等を記入した上で、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管しておいて下さい。
- 保証期間はご購入日から1年間です。
- サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読み下さい。それでも異常がある場合は、上記フリーダイヤルへご相談下さい。その際製品名、故障内容をお申し付け下さい。
- その他のアフターサービスについてご不明な点がございましたら、当社または販売店へお申し付け下さい。（平日AM 9:00～PM 5:00）

PKB-9用後付け昇降機		保証書
ロットNo.		
保証期間	対象部分 本 体	期間（ご購入日より） 1 年
ご購入日	年 月 日	
お客様	ご住所	
	お名前 様	
	お電話 ()	
		販売店

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご購入日から左記の期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、ご購入販売店に修理をご依頼下さい。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は無料修理いたします。
 2. 保証期間内に故障して、修理をお受けになる場合には、ご購入の販売店にご依頼下さい。修理のさいには本書をご提示下さい。修理は極力、部品交換をお願いします。もし出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせ下さい。

