

電動リクライニングベッド

PRB-385S

【取扱説明書】



この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
組立、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き
正しくご使用頂きますようお願い致します。
なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管下さい。



— 商品に関してのお問い合わせは下記へ —

 **0120-77-3433**

フリーダイヤル

(平日AM9:00~PM5:00)

もくじ

ページ

| | |
|---------------------------|-----|
| 安全にご使用いただくために…………… | 1~3 |
| PRB-385Sの各部の取扱・組立説明書…………… | 4~6 |
| 使い方…………… | 7 |
| 仕様…………… | 8 |
| 点検・お手入れ、修理を依頼される前に…………… | 8 |
| 保証書…………… | 9 |

安全にご使用いただくために

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示とそれぞれの意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みいただき、正しくお使い下さい。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示の例



この記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。近くに具体的な注意内容が表示されています。



この記号は特定しない一般的な禁止行為であることを告げるものです。近くに具体的な禁止内容の説明が表示されています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図中または近くに具体的な禁止内容（分解禁止等）が表示されています。

PRB-385S（電動リクライニングベッド）に関する警告及び注意



警告



身体の不自由な方や、意思表示のできない方がご使用になる時は、付添いの方が操作してあげて下さい。●操作ミスは大きな事故につながります。



操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。●ベッドに立った状態での操作は危険を伴うと同時に、モーターのトラブルに原因になります。





指づめにご注意下さい。
●危険防止のため注意箇所にはステッカーを貼ってあります。





ご使用になられる前に、各部ボルトが完全に固定されているか、ご確認下さい。
●ボルトがゆるんでいると、ご使用中にパーツが外れたりすることも考えられ、事故の原因になります。


 **警告**


 ベッドの上で飛びはねたり、ベッドの下にもぐり込まないで下さい。
●ネット部分の損傷やフレームにはさまれる等の事故につながります。


 背上げ、脚上げ箇所が物が挟まっていないか点検下さい。
●物が挟まったままの状態では稼働させますと、安全スイッチが働かず故障の原因になります。


 モーターの長時間連続使用（5分以上）はなさないで下さい。
●モーターの過熱により、火災や感電の原因になります。


 ストーブなどの火気類をベッドに近づけ過ぎないで下さい。
●火災の原因になります。


 電源コンセントは濡れた手で触らないで下さい。また、コードを抜く時は必ずコンセントを持って抜いて下さい。●感電等の危険があります。


 雷が鳴った時はコンセントを抜いて下さい。
●感電の恐れがあります。

 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧では使用しないで下さい。
●火災や感電の原因になります。

 ペースメーカーをご使用の方、電子機器による治療を行ってられる方は、通常のベッドの使用には支障はきたしません、心臓部をモーターに近づける様な事はしないで下さい。

 水などの液体で、手元スイッチや駆動部を濡らさないで下さい。
●ショートして火災や感電の原因になります。

 分解や改造はしないで下さい。
●火災や感電の原因になります。

 背部フレームに腰かけたり、うつ伏せに寝ている状態でベッドを作動させないで下さい。



注意



ベッドの下に物を置かないで下さい。
●作動不良によるトラブルの原因になります。



手元スイッチおよびコードの根元を極端に折りまげないで下さい。
●ショートの原因になります。



ベッドを2人以上でご使用にならないで下さい。



モーター作動中にテレビ等にノイズが発生することがございます。
予めご了承下さい。



ベッド移動時に左右フレームを持ち上げたり引っ張ったりしないで下さい。
●移動の際は、前後宮を持って移動して下さい。

電動リクライニングベッド PRB-385S の取扱・組立説明書

この度は、当製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みの上正しい使い方でご愛用下さい。


尚、この取扱説明書は組立て後も捨てずに、大切に保管しておいて下さい。

【組立て上の注意事項】

- 必ず2人以上で組立てて下さい。
- 不足の部品がありましたら、上記フリーダイヤルまでご連絡下さい。


部 品 明 細

① 本体ユニット

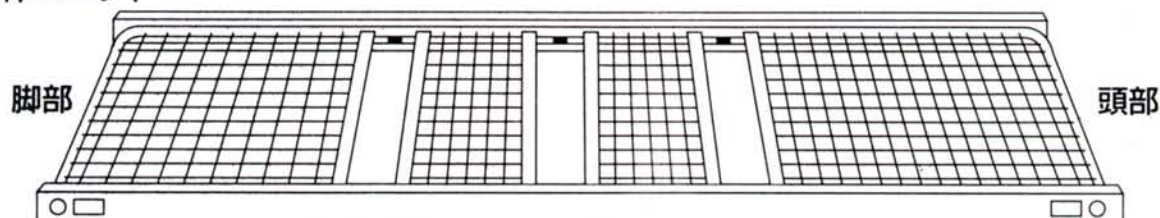


(モーターユニット)

電源コード
AC100V

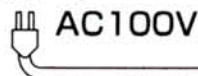

約3.9m

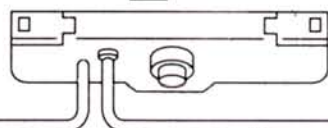


約2m

リモコンスイッチ




1セット (取付け済)

② ヘッドフレーム

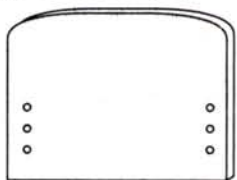


1枚

③ フットフレーム

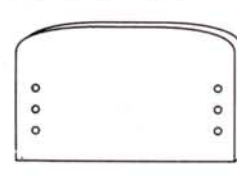


1枚

④ ベッドガード

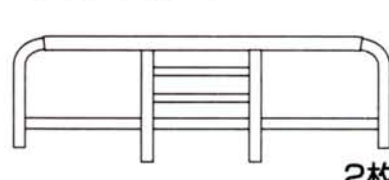

2枚

⑤ ボルト

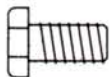

8本


⑥ 六角レンチ



1個

⑦ サイドフレーム

(内側)

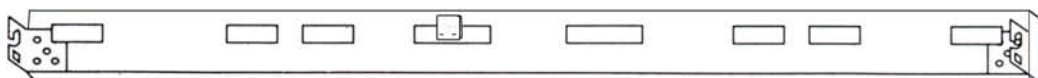

(外側)




2枚

組立て順序

※最初全体的にネジを緩く締めて、組立て完成後再度しっかりと締めて下さい。

- 1** 始めにヘッドフレーム②、フットフレーム③の上部の穴（下図の通り高さを2段階調節できます。高位置の場合一番上の穴、低位置の場合まん中の穴）にボルト⑤を4ヶ所軽く締めてサイドフレームの金具の上部に引っかけて下さい。その後サイドフレームの金具の下の穴にボルトを締め付け固定します。その際上部のボルトもしっかりと締め付け固定して下さい。

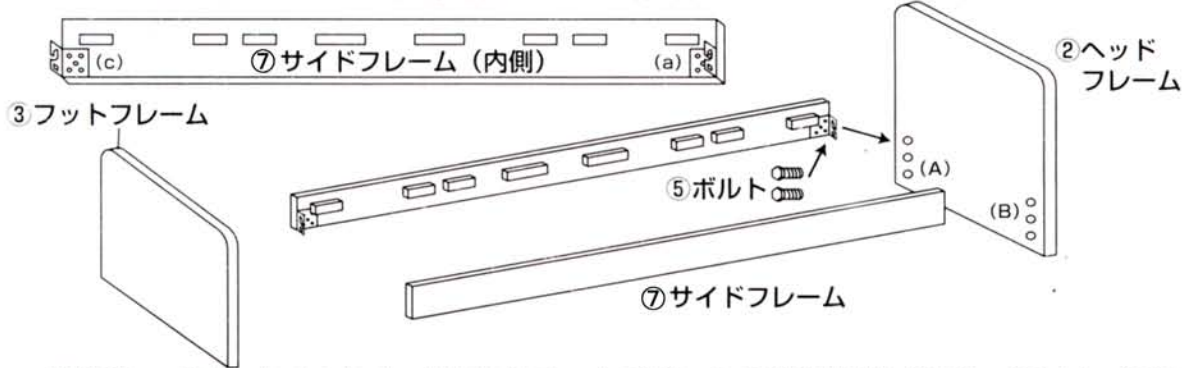

(ご注意) ヘッドフレーム/フットフレームとサイドフレームの各ジョイント部分にはそれぞれ(A)～(D) (a)～(d)のステッカーが貼ってあります。

(A)と(a)、(B)と(b)、(C)と(c)、(D)と(d)を合わせるように組み立てて下さい。

※組立ては二人で行うと便利です。一人が宮部分を持ち、もう一人がサイドフレーム後方を持って水平にしてあげて下さい。

また、この商品は組立て時に2段階に高さを設定（座面高 32/38.5cm）できます。

※下図を参照に高さを設定して下さい。


低く設定（ボルトを下の穴2ヶ所に） 高く設定（ボルトを上上の穴2ヶ所に）



- 2** 床面ユニット①を水平にして■で組み立てたサイドフレーム⑦に乗せます。

(注) この際ネットを固定してあるバンドが緩んでいないかをご確認の上、手を挟まないよう★印の部分を持って取付けて下さい。（ネットに前、後のシールが貼ってあります。前宮の方に前が来るようにして下さい。）また、サイドフレーム内側両端のゴムの間に本体が来るよう ネットを落とし込んで下さい。

（木部のサイドフレームとスチール部がおおよそフラットになっていれば正しい位置にセットされています）

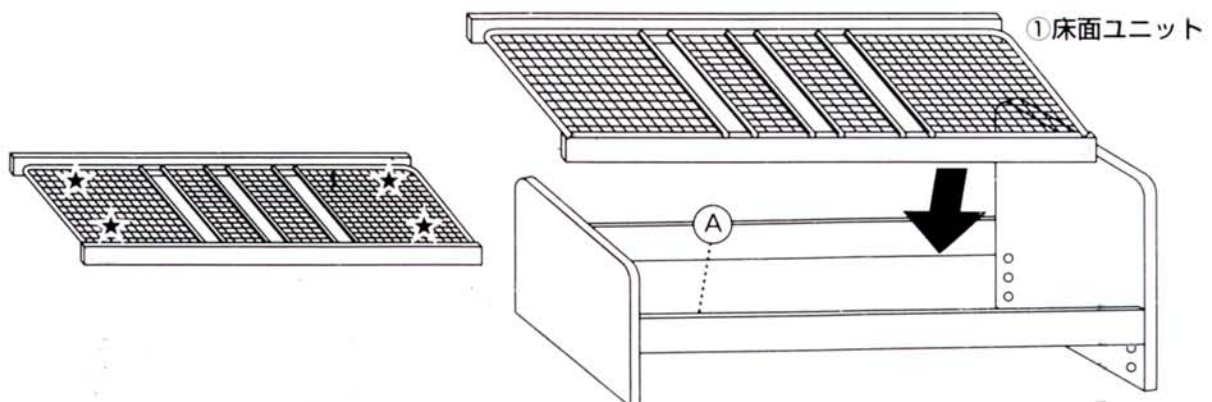


3 ネットの背、脚フレームを固定してあったバンドを切って下さい。

ご注意 バンドを切らずにモーターを作動させますと、ネットが固定されたまま上がらずモーターがショートし大変危険です!!


サイドフレームのボトム受けブロックには反り防止用の金具を付けてあります。金具の内側にボトムの外枠を落とし込んでください。

●宮（頭・脚）とネットの間が
各約2cmずつ空くように設置します。

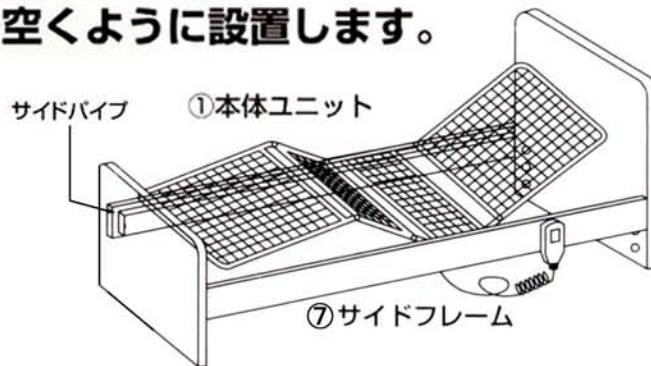


4 ベッドの両サイドにベッドガード
④を差し込んで完成です。

※両サイドのスチールフレームには各6個のベッドガード取り付け用の穴が開いており、頭部・腰部・脚部の3カ所への取付けが可能です。また、取り外してご使用になっても構いません。

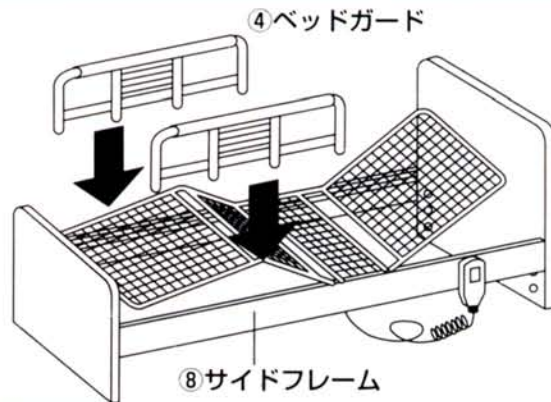

完 成 図

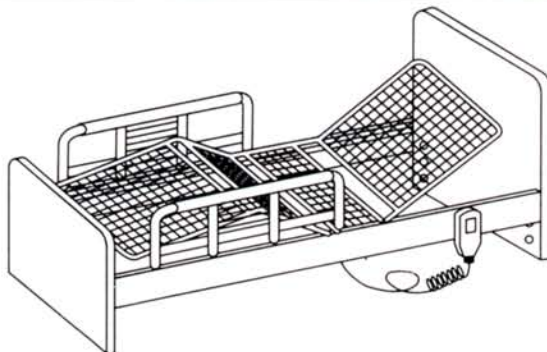

お願い 組立て完成後再度各部ボルトの締付けを完全に行ってください。

※PRB-385Sのご使用方法につきましては⑦ページに記載しております。

PRB-385Sの使い方

1.電源を入れる。

(電源コードをコンセントに接続して下さい)

ご注意 使用電源は家庭用100Vです。
危険ですのでたこ足配線はしないで下さい。


2.手元スイッチで操作する

(リモコンスイッチの使い方)


- このリモコンは電動無段階自在式の3ポイント (A.背、B.脚、C.背・脚同時) 選択タイプです。
- 同時に2つ以上のボタンを押すと故障しますので絶対にやめて下さい。
- 操作スイッチを押すと作動します。

A 背 B 脚 C 背・脚

パイロットランプ

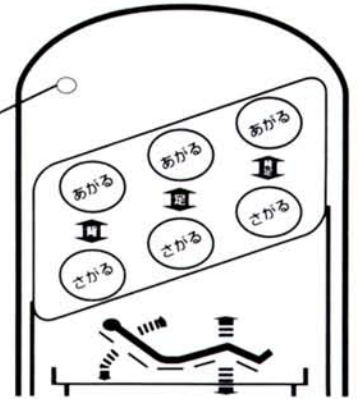


A 背もたれの上下

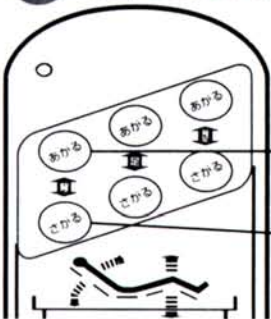


上げる場合

下げる場合

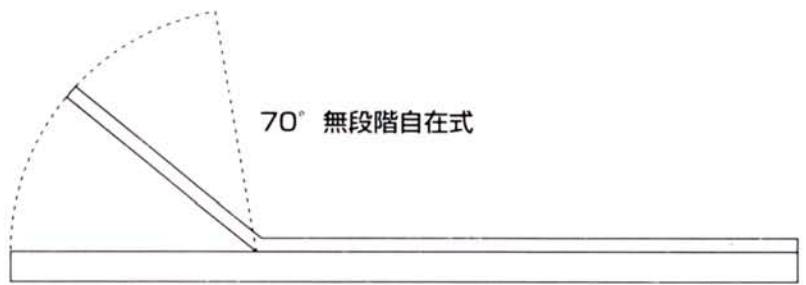


B 脚部の上下

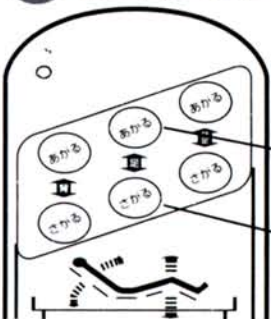


上げる場合

下げる場合

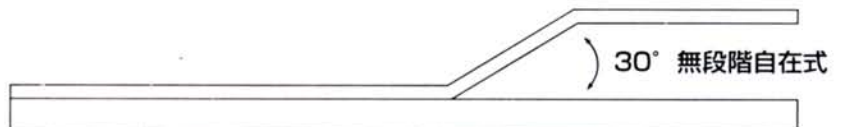


C 背もたれ・脚部の上下

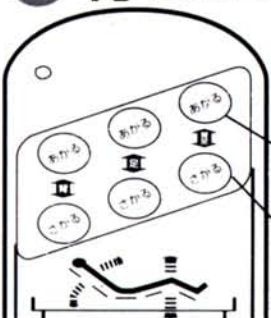

上げる場合

下げる場合

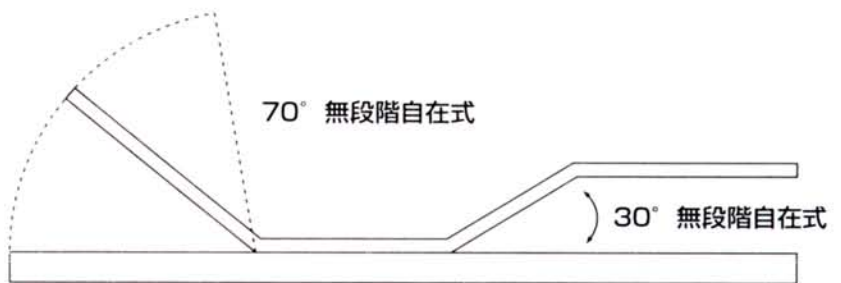

PRB-385Sの仕様

| 家庭用品品質表示に基づく表示および乙種電気用品（電動ベッド）の表示 | |
|-----------------------------------|---|
| 品番／品名 | PRB-385S／電動リクライニングベッド（通産省乙種電気用品輸入承認済） |
| 材 質 | 宮部・サイドフレーム：MDF プリント化粧合板、PVC（ポリ塩化ビニール） 床面部構造：鋼管、ワイヤーボトム（ベッドガード付き） |
| 電動機能 | 無段階自在式、3ポイント選択タイプ（耐荷重200kg） 背上げ／上下単独、脚上げ／上下単独、背脚同時連動 |
| 床面形状 | 通風性と体にやさしくフィットするワイヤーボトムを使用。 床面形状は4ブロックに分けてあります。 背上げ角度（0～70度）脚上げ角度（0～30度） |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz 定格消費電力 55W |
| モーターユニット | オキン（ドイツ）製（通産省乙種電気用品輸入承認済） |
| 定格使用時間 | 連続使用5分（一人での使用に限定） |
| 商品梱包 | 梱包1／3：床面ユニット＋モーター部＋ベッドガード 梱包2／3：ヘッドフレーム＋フットフレーム＋取扱説明書＋部品 梱包3／3：サイドフレーム（2本） |
| ベッド寸法 | 幅 980 mm × 長さ 2020 mm × 高さ 660 mm |
| マットレス寸法 | 1950mm × 850mm × 60mm（別売） |
| 梱包サイズ | 梱包1／3：2000mm × 950mm × 220mm 梱包2／3：1020mm × 710mm × 80mm 梱包3／3：2060mm × 240mm × 110mm |
| 重 量 | 梱包1／3：43.5kg 梱包2／3：14kg 梱包3／3：17kg |
| 原 産 国 | マレーシア（モーターユニットはドイツ製） |
| 表 示 者 | （株）プラッツ フリーダイヤル：0120-77-3433（月曜～金曜） |

- ご注意とお願い**
- ベッドに立った状態でのモーターの作動は絶対になさらないで下さい。
 - お客様のご使用上のミスにて発生したトラブルに関しては、責任を負いかねます。

点検・お手入れ

- 本体のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いて下さい。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用下さい。アルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検して下さい。
- 電動モーター周辺の駆動部は、時々ハケやブラシで掃除して下さい。

修理を依頼される前に

- 修理を依頼される前にもう一度ご確認下さい。

| 症 状 | チ ェ ッ ク | 処 置 |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 手元スイッチを押しても動かない。 | コンセントに電気はきていますか？ | コンセントに他の電気器具を接続して確認して下さい。 |
| | 電源コードのプラグが確実にコンセントに接続されていますか？ | 電源コードのプラグを確実にコンセントに接続して下さい。 |

■アフターサービスについて

お客様保管用です

- このベッド(PRB-385S)には保証書を添付致しております。「販売店・購入日・お名前」等を記入した上で、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管しておいて下さい。
- 保障期間はご購入日から1年間です。
- サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読み下さい。それでも異常がある場合は、上記フリーダイヤルへご相談下さい。その際製品名、故障内容をお申し付け下さい。
- その他のアフターサービスについてご不明な点がございましたら、上記フリーダイヤルへお申し付け下さい。(平日AM9:00~PM6:00)

電動リクライニングベッド

保証書

ロット No.

| | | |
|-------|---------|-------------|
| 保証期間 | 対象部分 | 期間 (ご購入日より) |
| | 本 体 | 1 カ 年 |
| ご購入日 | 年 月 日 | |
| お 客 様 | ご住所 | |
| | お名前 様 | |
| | お電話 () | |

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うこと
をお約束するものです。
ご購入日から左記の期間中故障が発生した場合は、本書
をご提示の上、ご購入販売店に修理をご依頼下さい。

販売店

〈無料修理規定〉

- 保証期間中において取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して、修理をお受けになる場合には、ご購入の販売店にご依頼下さい。修理のさいには本書をご提示下さい。修理は極力、部品交換でお願いします。もし出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書においてお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保障期間経過後の修理についてはご不明な場合は、お買上げの販売店にお問い合わせ下さい。

■発売元

株式会社 **フラッツ**

〒 816-0921
福岡県大野城市
仲畑 2 丁目
8 - 2 8

— 商品に関してのお問い合わせは下記へ —

0120-77-3433

お客様へ

この度は電動リクライニングベッド（PRB-385S）をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

商品の改良に伴い、取扱説明書について一部訂正がございますので、以下の通り御案内致します。

何卒、御理解・御了承の程宜しくお願い申し上げます。

1. もくじ（表紙）

- 「PKB-305 の各部の取扱・組立説明書…4～6」
⇒PKB-305 ではなく、**PRB-385S** になります。

2. 組立て上の注意事項（④ページ）

- プラスドライバーをご用意下さい。
⇒組立てには六角レンチを使用するので、プラスドライバーは使用しません。
- ⑥木ネジ（④ページ）
⇒「木ネジ」ではなく、「六角レンチ」です。
- （注）透明の保護フィルム
⇒現在、保護フィルムは貼っておりませんのではがす必要はありません。

3. 商品仕様（⑧ページ）

- ベッド寸法…幅970mm×長さ2050mm×高さ660mm



ベッド寸法…幅980mm×長さ2020mm×高さ660mm

〒816-0921

福岡県大野城市中畑2丁目8-28

（株）プラッツ

フリーダイヤル：0120-77-3433