



宮付電動 1 モーターベッド

PSB-7000 / PSB-CS1MA

【取扱説明書】



この度は、宮付電動1モーターベッドをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、組み立て、ご使用前に必ずお読み頂き、正しくご使用いただきますようお願い致します。

- 介護が必要な方がお使いになる場合は、介護する方もこの取扱説明書を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社まで、お問い合わせください。

目次

	ページ
安全にご使用いただくために	2~ 4
部品の確認	5~ 6
主要部品の名称	7
リモコンの使用方法	8
ベッドの組立方法	9~ 11
背上げのみ・背脚連動の切り替	12
故障かな・・・!? 点検・お手入れ	13
アフターサービスについて	13
商品の仕様	14

商品の特徴

リモコンのボタンを押すだけで、背73°・脚25°までリクライニング
します。(背脚連動・背のみに切り替え可能)
立ち上がり時に便利な手すりは、片側4箇所に取り付け可能です。
ベッドの高さは、36/29.5/23cmのいずれかに設定可能です。
(組み立て時)

安全にご使用いただくために

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、ご利用者への危害や財産への損害を未然に防止する為に、色々な絵表示をしております。下記を良くお読み頂き、内容をよく理解してから正しくお使いください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いを行うと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いを行うと、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意 (警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。近くに具体的な注意内容が表示されています。



この記号は特定しない一般的な禁止行為であることを告げるものです。近くに具体的な禁止内容が表示されています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。中または近くに具体的な禁止内容 (分解禁止等) が表示されています。

警告



身体の不自由な方や、意思表示できない方がご使用になる時は、付添いの方が操作してあげてください。操作ミスは大きな事故につながります。



操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。ベッドに立った状態での操作は危険を伴うのと同時に、モーターのトラブルの原因になります。



指づめにご注意ください。



ご使用になれる前に、各部ボルトが完全に固定されているか、ご確認下さい。ボルトがゆるんでいると、ご使用中にパーツが外れたりすることも考えられ、事故の原因になります。

警告



ベッドの上で飛びはねたり、ベッドの下にもぐり込まないでください。
ネット部分の損傷やフレームにはさまれる等の事故の原因につながります。



背上げ、脚上げ箇所に物が挟まっていないか点検してください。
物が挟まったままの状態で作動させますと、安全スイッチが働かず故障の原因になります。



モーターの長時間連続使用（2分以上）はなさないでください。
モーターの過熱により、火災や感電の原因になります。



ストーブなどの火気類をベッドに近づけないでください。
火災の原因になります。



電源コンセントは濡れた手で触らないで下さい。また、コードを抜く時は必ずコンセントを持って抜いてください。 感電等の危険があります。



雷が鳴った時はコンセントを抜いてください。
感電の恐れがあります。



表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧では使用しないで下さい。 火災や感電の原因になります。



ペースメーカーをご使用の方、電子機器による治療を行っておられる方は、通常のベッドの使用には支障をきたしません。が、心臓部をモーターに近づける様なことはしないでください。



水などの液体で、手元スイッチや駆動部を濡らさないでください。
ショートして火災や感電の原因になります。



分解や改造はしないでください。
火災や感電の原因になります。



背部フレームに腰掛けたり、うつ伏せに寝ている状態でベッドを作動させないでください。



電源コンセントに差し込んだままの電源プラグに、ほこりなどが付いていないか点検してください。 付着してありましたら清掃をしてください。
ほこりなどの付着は、火災の原因になります。

注意



ベッドの下に物を置かないでください。
作動不良によるトラブルの原因になります。



手元スイッチおよびコードの根元を極端に折り曲げないでください。
ショートの原因になります。



ベッドを2人以上でご使用にならないで下さい。



モーター作動中にテレビ等にノイズが発生することがございます。
予めご了承ください。

部品の確認

- 開梱した時点で、下記の部品が全て同梱されているか、また、破損していないか確認してください。
万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

PSB-7000

- リモコン・・・・・・・・・・1個



PSB-CS1MA

- リモコン・・・・・・・・・・1個



- 本体ユニット・・・・・・・・・・1台



PSB-7000/PSB-CS1MA 共通

- ヘッドボード・・・・・・・・・・1枚



PSB-7000/PSB-CS1MA 共通

- フットボード・・・・・・・・・・1枚



PSB-7000/PSB-CS1MA 共通

- サイドフレーム・・・・・・・・・・2本




部品の確認


■ サイドレール・・・・・・・・・・2本



■ 六角レンチ・・・・・・・・・・1本

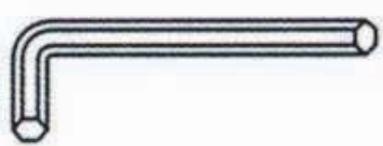

■ 組立用ボルト・・・・・・・・・・8本

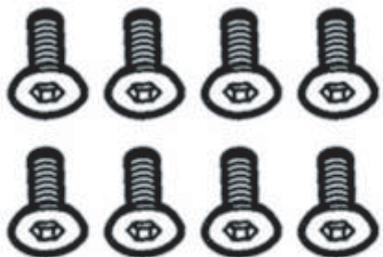


■ 保証書・・・・・・・・・・1枚



■ 取扱説明書・・・・・・・・・・1冊



■ マットレス・・・・・・・・・・1枚

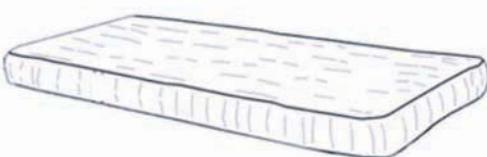


主要部品の名称

PSB-7000 リモコン



PSB-CS1MA リモコン

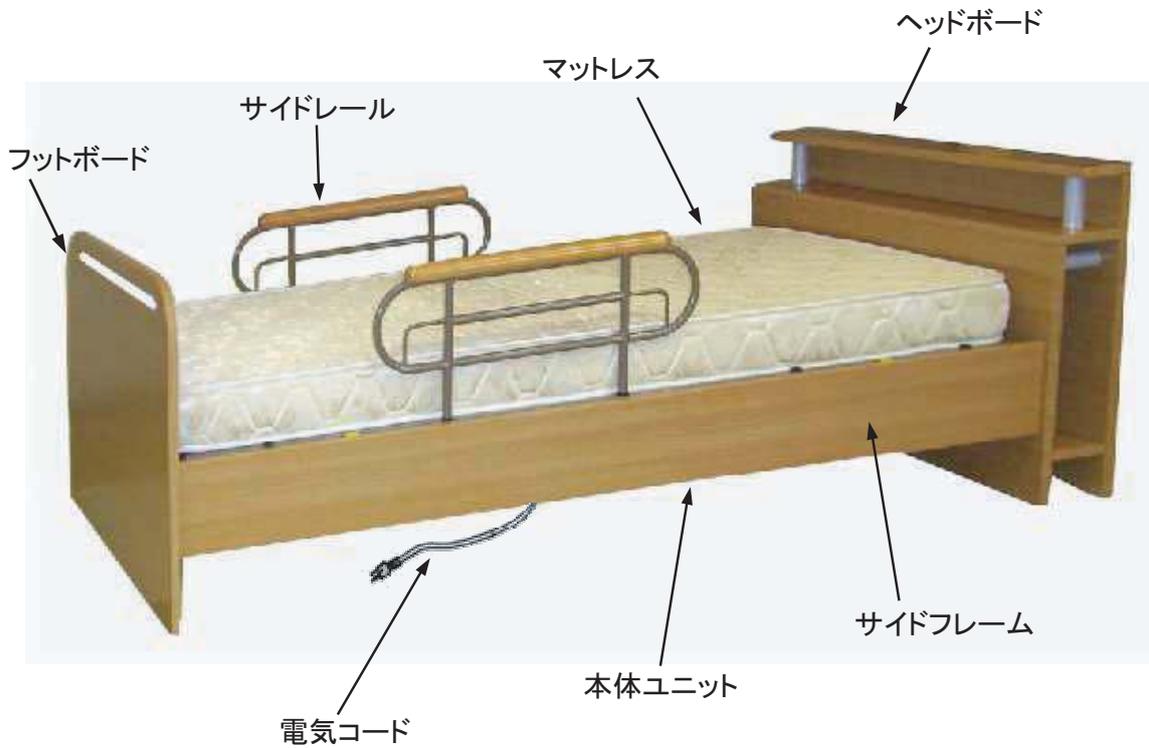

リモコンの使用法




警告



ベッドを一定の期間使用しない場合や、介護者が長時間ベッドから離れる場合は電源プラグを抜いてください。
誤作動による事故の恐れがあります。

①電源を入れる。
(電源プラグをコンセントに接続してください。)

②リモコンで操作する。
●このリモコンは電動無段階自在式です。

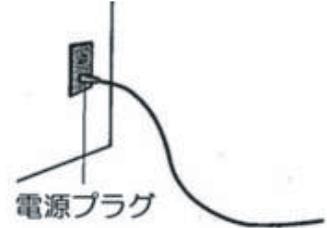


A 背もたれ・脚部の上下

背脚連動
背の角度：0° ~ 73°
脚の角度：0° ~ 25°




PSB-7000 リモコン

PSB-CS1MA リモコン

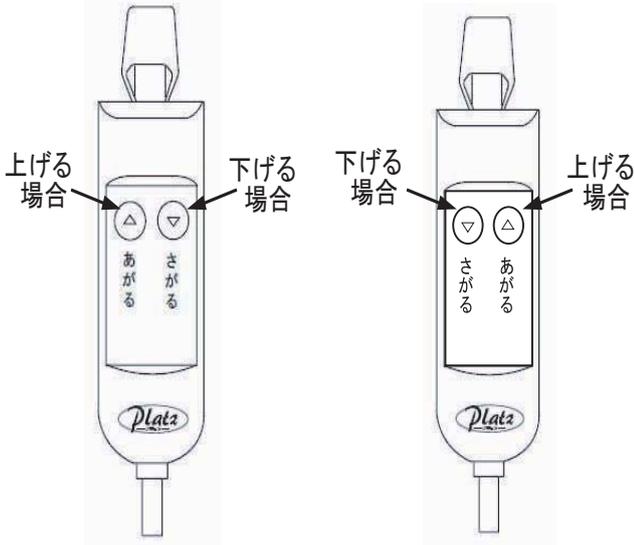

B 背もたれの上下

ワイヤーの金具を外した場合
(12頁を参照して下さい)
背の角度：0° ~ 73°

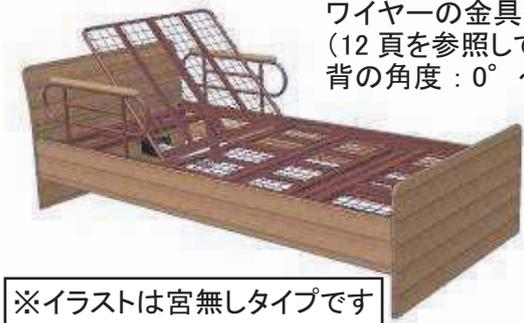

注意



操作は必ずベッドに寝た状態で行ってください。
ベッドに立った状態や座った状態での操作はケガをする恐れがあり危険です。



「あがる」と「さがる」ボタンを同時に押さないでください。
リモコンまたはモーターの故障の原因になります。



たこ足配線はしないでください。
使用電源は家庭用100Vです。
たこ足配線等で定格を超えると、発電による火災の原因になります。

ベッドの組立方法



注意



組立の際に、ユニットで手を挟まないようご注意ください。

まず、設定したい床面高 (23cm、29.5cm、36cm) を決めます。
次に、下図の様にヘッド・フットボードにボルトを軽く締め込みます。



床面高を36cmに設定する場合

床面高を29.5cmに設定する場合


床面高を23cmに設定する場合

お願い

組立は2人以上で行ってください。



で留めたボルトにサイドフレームの金具を引っ掛けます。
次に、金具の下側に空いている穴に、ボルトを締め付け固定します。
その際、 で留めたボルトも、工具を使いしっかりと固定してください。

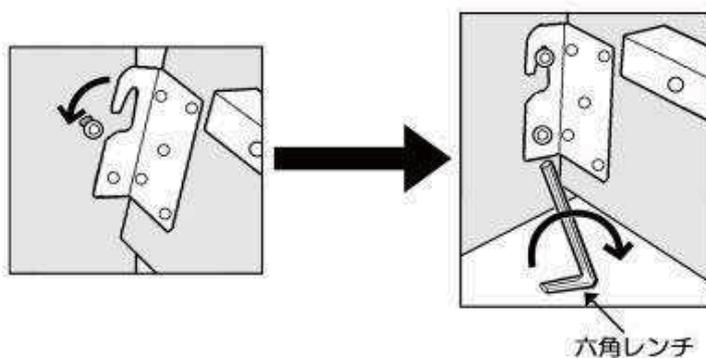


ベッドの組立方法

で組み立てたサイドフレームに、本体ユニットを乗せます。

 **注意**




ネットの部分だけを持って上げないで下さい。
本体ユニットの外枠が下に落下しますので、大変危険です。

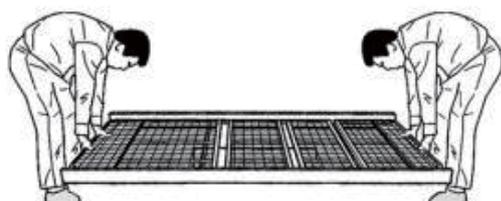

お願い

組立は2人以上で行って下さい。

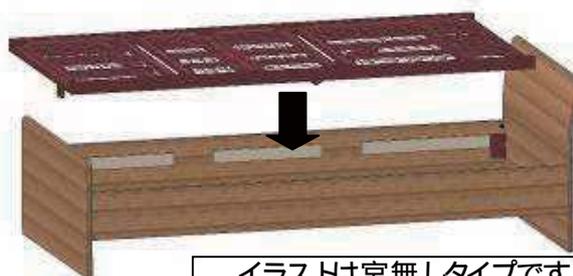


イラストは宮無しタイプです

本体ユニットの背・脚ネットを固定していたマジックテープバンドを取り外します。

 **注意**



必ずマジックテープバンドを取り外して下さい。バンドを切らずにモーターを動作すると、ネットが持ち上がらず、モーターがショートする危険があります。

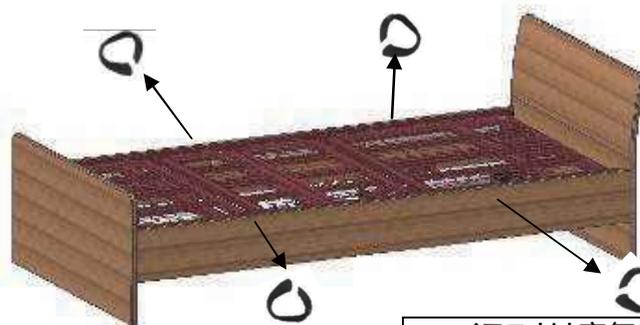

マジックテープバンド


イラストは宮無しタイプです

ベッドの組立方法

本体ユニットの左右両端に空いているサイドレール取り付け穴に、サイドレールを差込みます。片側4箇所に取り付可能です。




マットレスを載せます。

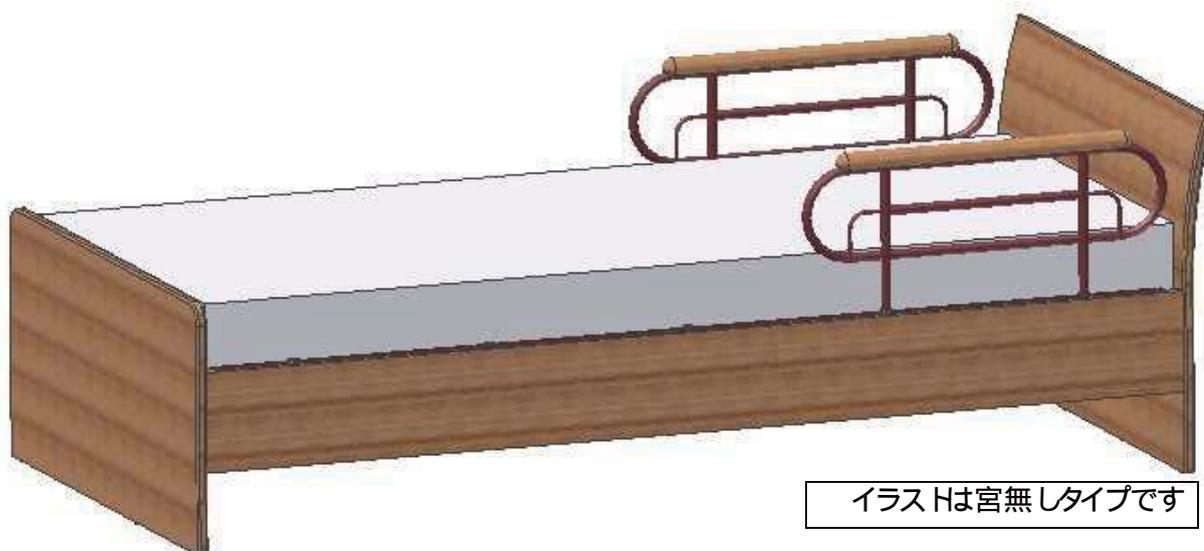


背上げのみ・背脚連動の切替

背上げのみと背・脚連動の切り替えは、下図の↓(矢印)部分の取り外しで行う事が出来ます。ワイヤーを固定すると連動となり、外すと背上げのみの作動になります。


※脚上げのみは出来ません。

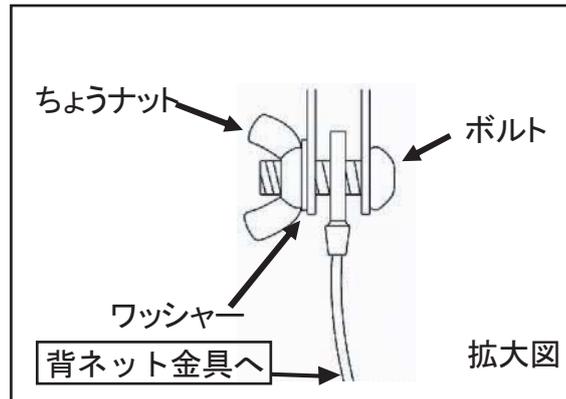

PSB-7000

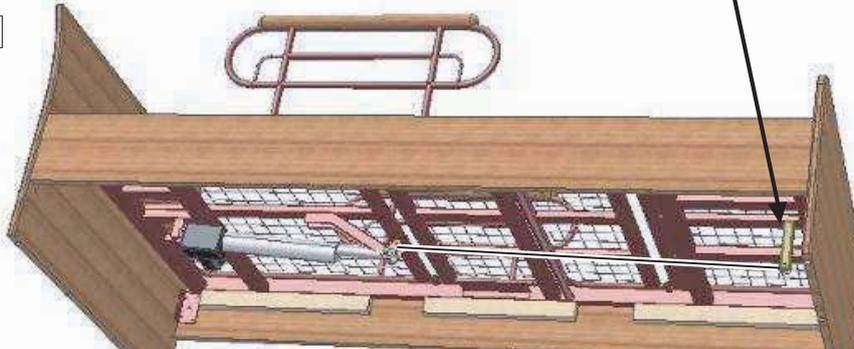

PSB-CS1MA

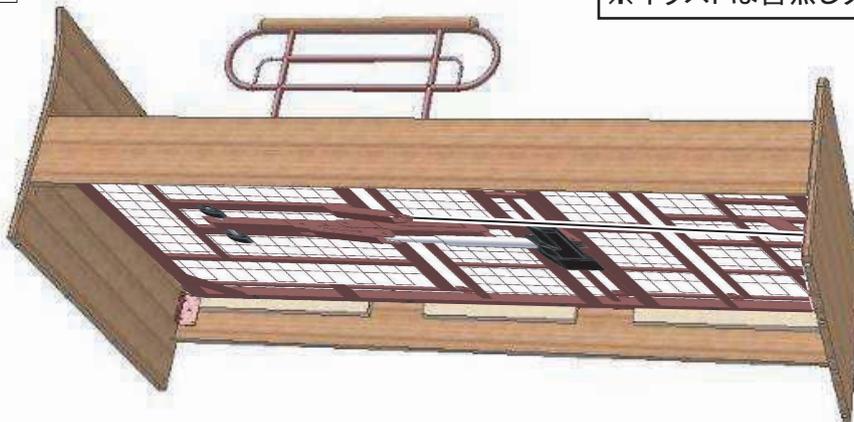

※イラストは宮無しタイプです

※イラストは宮無しタイプです

故障かな・・・！？

下記項目で確認してください。

電源プラグが抜けていませんか？

⇒ 電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込んでください。

電源プラグが破損していませんか？

⇒ 販売店にご相談ください。

リモコンコードが抜けていませんか？

⇒ リモコンのコネクターをモーターの差込口に差し込んでください。

連続使用(2分以上)していませんか？

⇒ 販売店にご相談ください。

ベッドの下や後ろに障害物がありませんか？

⇒ 障害物を取り除いてください。

ベッドの下や後ろに障害物がありませんか？

⇒ 障害物を取り除いてください。

停電していませんか？

ブレーカーがとんでいませんか？

点検・お手入れ


本体のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、中性洗剤を少し含ませた水を湿らせた布で磨いてください。

製品に水を散らしたり、ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉・オイル類などで磨いたり、殺虫剤を撒いたりしないでください。

ひび割れや感電、火災の危険があります。

ネジ類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検してください。

電動モーター周辺の駆動部は、時々ハケやブラシで掃除してください。

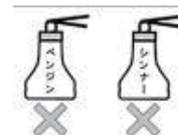

アフターサービスについて

保証書は販売店、お買い上げ日、お名前等を記入した上で、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。


サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読みください。

それでも異常がある場合は、販売店または弊社へご相談ください。

その際に製品名、故障内容をお申し付けください。

その他アフターサービスについてご不明な点がございましたら、販売店または弊社へお申し付けください。フリーコールの受付は平日AM 9:00～PM 5:00 となっております。

商品の仕様

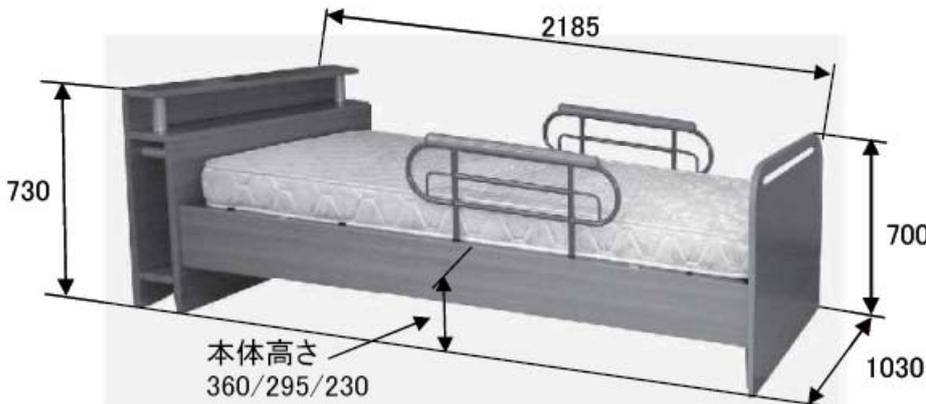品番	PSB-7000/PSB-CS1MA	
品名	宮付電動1モーターベッド	
ベッド寸法	 <p>マットレスのサイズ:1960X970X130 (単位:mm)</p>	
梱包商品	(1/4)本体ユニット部 (2/4)ヘッド・フットボード部 (3/4)サイドフレーム部 (4/4)マットレス部	
梱包サイズ	(1/4) 1985X1020X200mm	40kg (32kg)
梱包重量 (本体重量)	(2/4) 1080X780X225mm	27kg (24kg)
	(3/4) 2020X230X115mm	17kg (15.5kg)
	(4/4) 1960X970X130mm	8.8kg (7.8kg)
材質	本体ユニット:スチール 木部:MDF マットレス:表地 ポリエステルプリント生地 芯地 低反発ウレタン、ポリウレタン	
電動機能	無段階自在式 1ポイント選択タイプ 背上げ、背脚同時連動	
床面形状	通気性に優れ、体にやさしくフィットするスチールメッシュ方式 床面形状は4ブロックに分けてあります。 背上げ角度(0°~73°±3°) 脚上げ角度(0°~25°±3°)	
定格電圧	AC 100V 50/60Hz	
定格消費電力	約50W	
耐荷重	90kg	
原産国	本体:ベトナム マットレス:マレーシア 木部・モーター:中国	



株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目8-28

08.11月 改訂
'08.11-2