



電動1モーターベッド

PSB-798 LB/LBS/BC/BCS

【取扱説明書】



※写真はPSB-798LBS

この度は、電動1モーターベッドをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、組み立て、ご使用前に必ずお読み頂き、正しくご使用いただきますようお願い致します。

- 介護が必要な方がお使いになる場合は、介護する方もこの取扱説明書を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管して下さい。
- 製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡し下さい。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社まで、お問い合わせ下さい。

目次

	ページ
安全にご使用いただくために.....	2~4
部品の確認	5~6
主要部品の名称	7
リモコンの使用法	8
ベッドの組立方法	9~11
背上げのみ・背脚連動の切り替.....	12
故障かな...!? 点検・お手入れ	13
商品の仕様	14

商品の特徴

- リモコンのボタンを押すだけで、背73° ・脚25° までリクライニングします。（背脚連動・背のみに切り替え可能）
- 立ち上がり時に便利な手すりは、片側4箇所に取り付け可能です。
- ベッドの高さは、360/295mmのいずれかに設定可能です。（組み立て時）

安全にご使用いただくために

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、ご利用者への危害や財産への損害を未然に防止する為に、色々な絵表示をしております。下記を良くお読み頂き、内容をよく理解してから正しくお使い下さい。



警告

この表示を無視して誤った取扱いを行うと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いを行うと、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例



この記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。近くに具体的な注意内容が表示されています。



この記号は特定しない一般的な禁止行為であることを告げるものです。近くに具体的な禁止内容が表示されています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。中または近くに具体的な禁止内容(分解禁止等)が表示されています。

警告



身体の不自由な方や、意思表示できない方がご使用になる時は、付添いの方が操作してあげて下さい。●操作ミスは大きな事故につながります。



操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。●ベッドに立った状態での操作は危険を伴うのと同時に、モーターのトラブルの原因になります。



指づめにご注意下さい。



ご使用になる前に、各部ボルトが完全に固定されているか、ご確認下さい。●ボルトがゆるんでいると、ご使用中にパーツが外れたりすることも考えられ、事故の原因になります。

警告



ベッドの上で飛びはねたり、ベッドの下にもぐり込まないで下さい。●ネット部分の損傷やフレームにはさまれる等の事故の原因につながります。



背上げ、脚上げ箇所が物が挟まっていないか点検して下さい。
●物が挟まったままの状態で作動させますと、安全スイッチが働かず故障の原因になります。



モーターの長時間連続使用（5分以上）はなさらないで下さい。
●モーターの過熱により、火災や感電の原因になります。



ストーブなどの火気類をベッドに近づけないで下さい。
●火災の原因になります。



電源コンセントは濡れた手で触らないで下さい。また、コードを抜く時は必ずコンセントを持って抜いて下さい。●感電等の危険があります。



雷が鳴った時はコンセントを抜いて下さい。
●感電の恐れがあります。



表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧では使用しないで下さい。●火災や感電の原因になります。



ペースメーカーをご使用の方、電子機器による治療を行っておられる方は、通常のベッドの使用には支障をきたしませんが、心臓部をモーターに近づける様なことはしないで下さい。



水などの液体で、手元スイッチや駆動部を濡らさないで下さい。
●ショートして火災や感電の原因になります。



分解や改造はしないで下さい。
●火災や感電の原因になります。



背部フレームに腰掛けたり、うつ伏せに寝ている状態でベッドを作動させないで下さい。

注意



ベッドの下に物を置かないで下さい。
●作動不良によるトラブルの原因になります。



手元スイッチおよびコードの根元を極端に折り曲げないで下さい。
●ショートの原因になります。



ベッドを2人以上でご使用にならないで下さい。



モーター作動中にテレビ等にノイズが発生することがございます。
予めご了承下さい。

部品の確認

- 開梱した時点で、下記の部品が全て同梱されているか、また、破損していないか確認して下さい。
万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社まで御連絡下さい。

■ 本体ユニット・・・・・・・・・・1台



■ リモコン・・・・・・・・・・1個



■ ヘッドボード・・・・・・・・・・1枚



■ フットボード・・・・・・・・・・1枚



■ サイドフレーム・・・・・・・・・・2本



■ サイドレール・・・・・・・・・・2本




部品の確認

■ 六角レンチ・・・・・・・・・・1本



■ 組立用ボルト・・・・・・・・・・8本

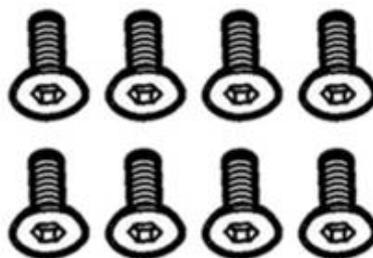


■ 保証書・・・・・・・・・・1枚




■ 取扱説明書・・・・・・・・・・1冊



■ マットレス・・・・・・・・・・1枚
 ※PSB-798LBS/BCSのみ 付属します

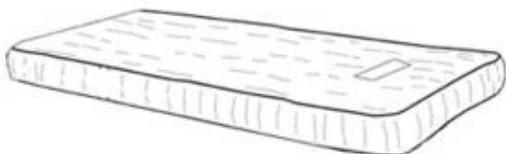


主要部品の名称

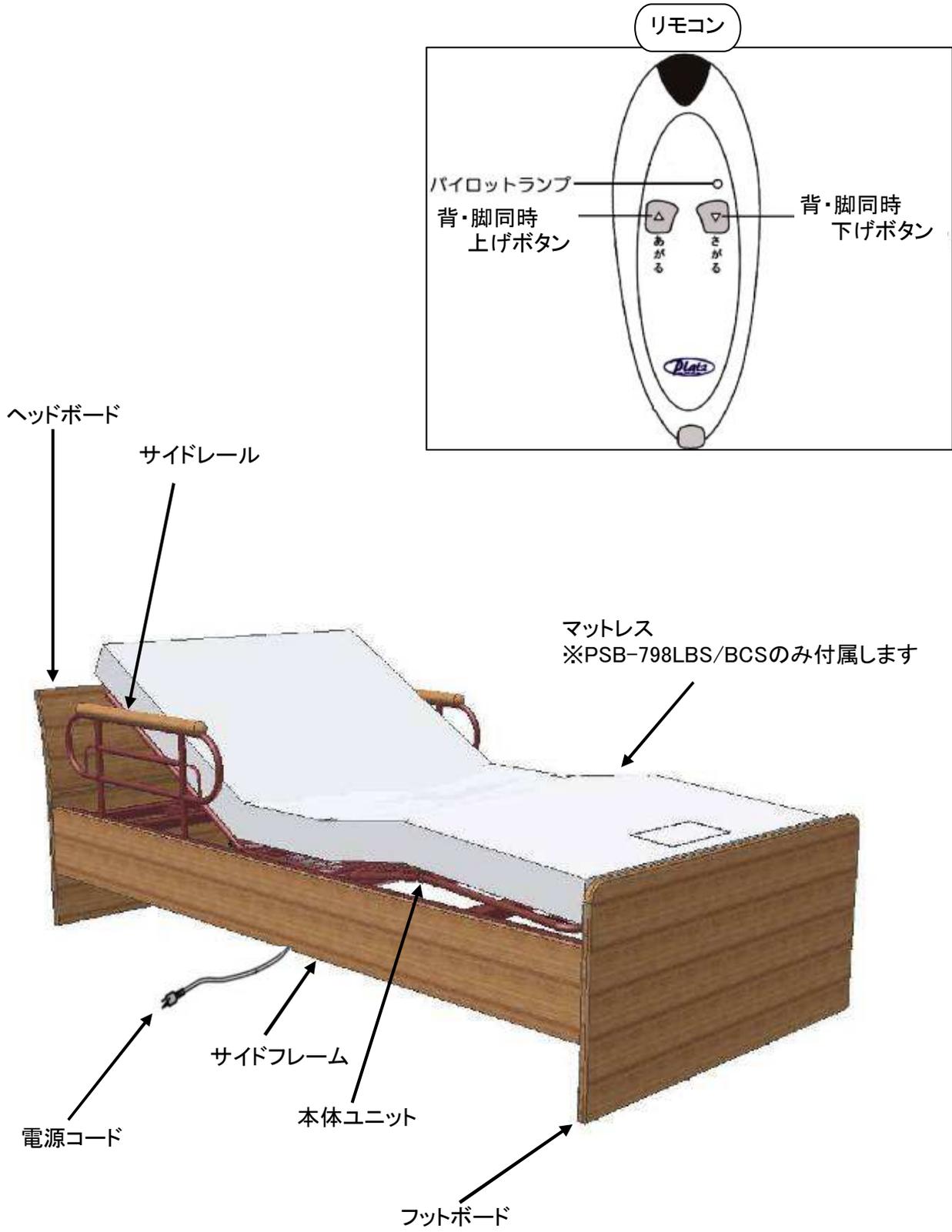

リモコンの使用方法

 警告		ベッドを一定期間使用しない場合や、介護者が長時間ベッドから離れる場合は、電源プラグを抜いて下さい。誤操作による事故のおそれがあります。
---	---	---

①電源を入れる。
 (電源プラグをコンセントに接続して下さい。)

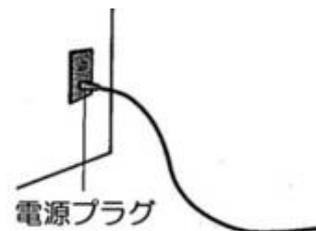

②リモコンで操作する。
 ●このリモコンは、電動無段階自在式です。
 ●操作スイッチを押すと、パイロットランプが緑色に点灯します。

A 背もたれ・脚部の上下

背脚連動
 背の角度: 0° ~ 73°
 脚の角度: 0° ~ 25°



B 背もたれの上下

ワイヤーの金具を外した場合
 (12頁を参照して下さい)
 背の角度: 0° ~ 73°



 注意		操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。 ベッドに立った状態での操作は危険を伴うと同時に、モータートラブルの原因になります。
		「あがる」と「さがる」ボタンを同時に押さないで下さい。 リモコンまたはモーターの故障の原因になります。
		たこ足配線はしないで下さい。 使用電源は家庭用100Vです。 たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ベッドの組立方法




注意



組立の際に、ユニットで手を挟まないようにご注意ください。


- ① まず、設定したい床面高(29.5cmまたは36cm)を決めます。
次に、下図の様にヘッド・フットボードにボルトを軽く締め込みます。

床面高を29.5cmに設定する場合

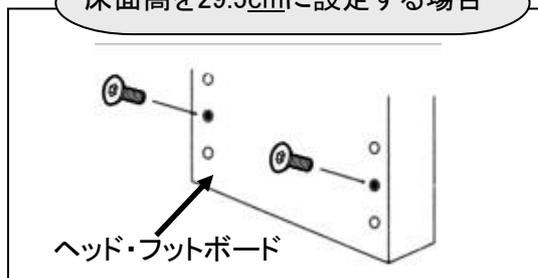

ヘッド・フットボード


床面高を36cmに設定する場合

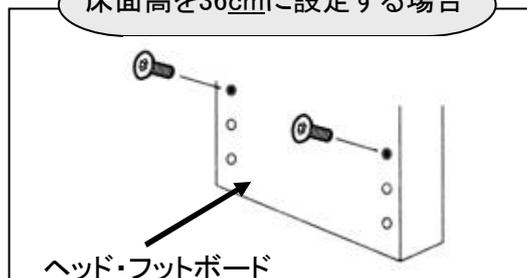


ヘッド・フットボード

お願い

- 組立は2人以上で行って下さい。

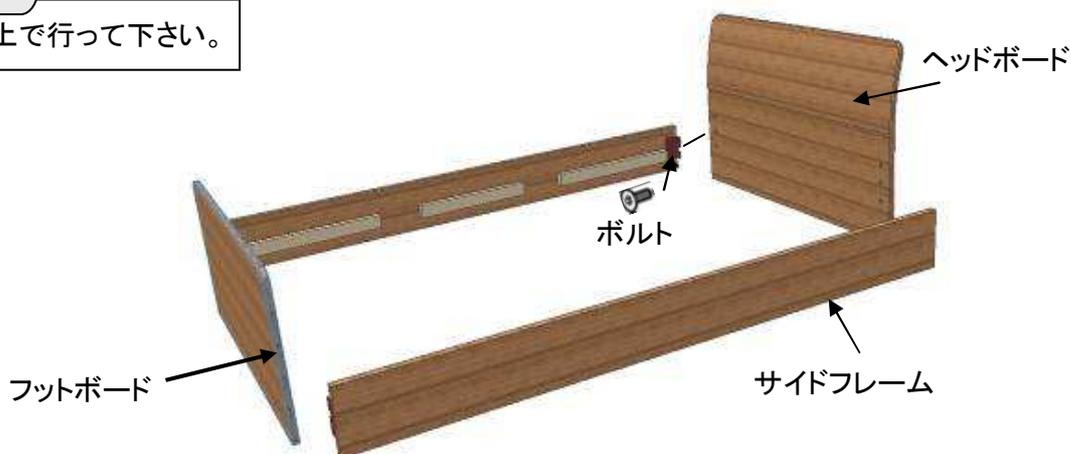

- ② ①で留めたボルトにサイドフレームの金具を引っ掛けます。
次に、金具の下側に空いている穴に、ボルトを締め付け固定します。
その際、①で留めたボルトも、工具を使いしっかりと固定して下さい。

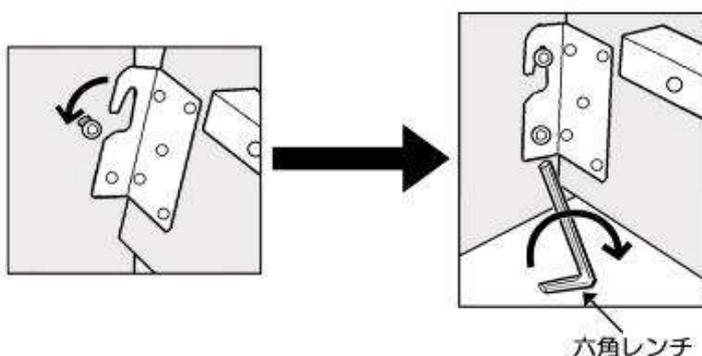

ベッドの組立方法


③ ②で組み立てたサイドフレームに、本体ユニットを乗せます。



注意




ネットの部分だけを持って上げないで下さい。
本体ユニットの外枠が下に落下しますので、大変危険です。

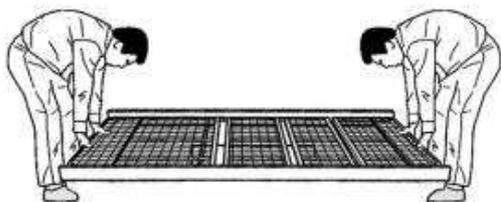

お願い

●組立は2人以上で行って下さい。

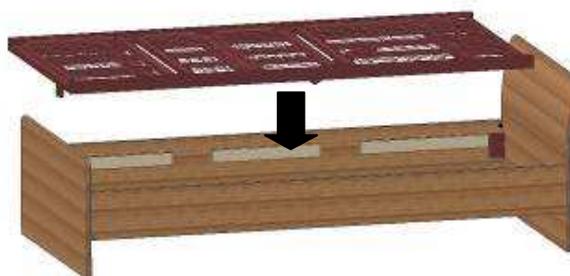


④ 本体ユニットの背・脚ネットを固定していたマジックテープバンドを取り外します。



注意




必ずマジックテープバンドを取り外して下さい。バンドを切らずにモーターを動作すると、ネットが持ち上がらず、モーターがショートする危険があります。

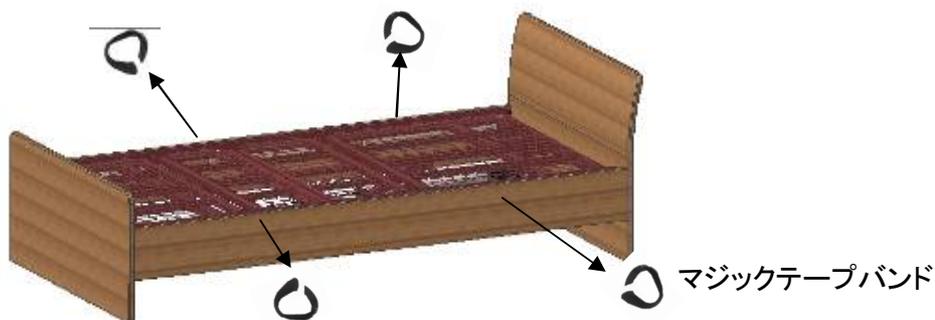


ベッドの組立方法

- ⑤ マットレスを載せます。(PSB-798LBS/BCSのみマットレスが付属します)

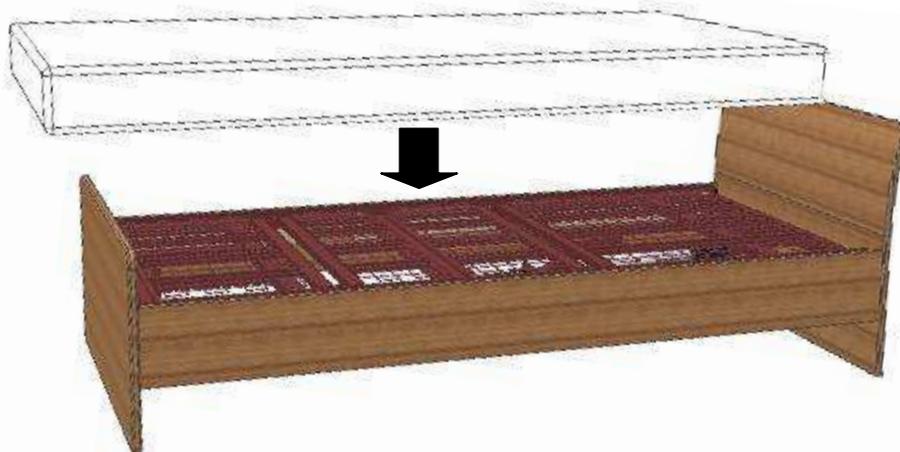


- ⑥ 本体ユニットの左右両端に空いているサイドレール取り付け穴に、サイドレールを差込みます。片側4箇所に取り付可能です。

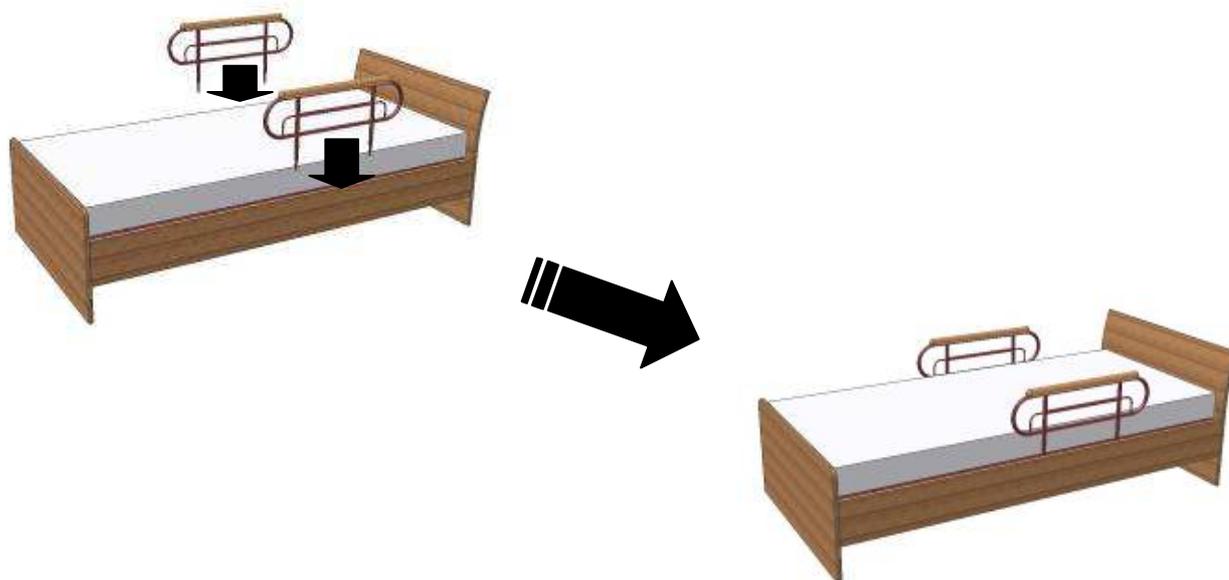


背上げのみ・背脚連動の切り替え

背上げのみと背・脚連動の切り替えは、下図の↓(矢印)部分の取り外しで行う事が出来ます。ワイヤーを固定すると連動となり、外すと背上げのみの作動になります。

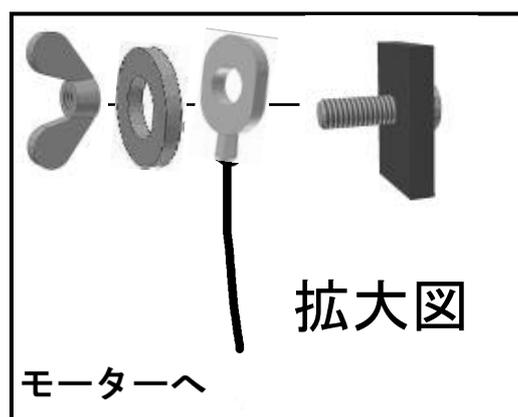

※脚上げのみは出来ません。

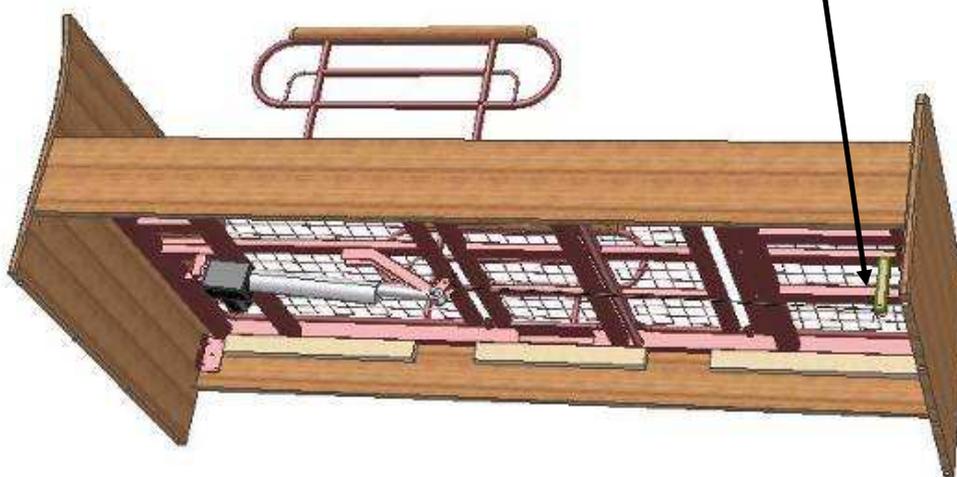

故障かな・・・！？

下記項目で確認してください。

- 電源プラグが抜けていませんか？
□電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込んで下さい。

- 電源プラグが破損していませんか？
□販売店にご相談下さい。

- リモコンコードが抜けていませんか？
□リモコンのコネクターをモーターの差込口に差し込んで下さい。

- 停電していませんか？
- ブレーカーがとんでいませんか？


点検・お手入れ

●お手入れ

- ・製品が汚れた際は、石鹼水や、中性洗剤を少し含ませた水を湿らせた布で磨いて下さい。




- ・製品に水を散らしたり、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤などで磨いたり、殺虫剤を撒いたりしないで下さい。ひび割れや感電、火災の危険があります。

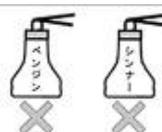

●点検

- ・各部分のボルト・ナットの締め具合を確認し、常に硬く締めて下さい。

商品の仕様

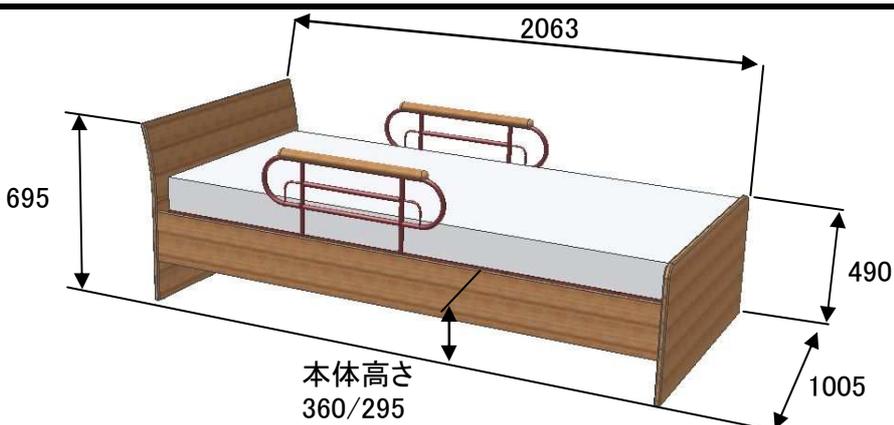品番	PSB-798LB/LBS/BC/BCS	
品名	電動1モーターベッド	
ベッド寸法	 <p>マットレスのサイズ: 1960X890X130 (単位: mm)</p>	
梱包商品	(1/4): 本体ユニット部 (2/4): ヘッド・フットボード部 (3/4): サイドフレーム部 (4/4): マットレス部	
梱包サイズ	(1/4) 1985X1020X200mm	40.0kg(32.0kg)
梱包重量 (本体重量)	(2/4) 1055X755X125mm	16.0kg(13.0kg)
	(3/4) 2045X240X115mm	16.5kg(15.5kg)
	(4/4) 1970X900X140mm	11.5kg(10.5kg)
材質	本体ユニット: スチール 木部: MDF マットレス: 表地 ポリエステルプリント生地 芯地 低反発ウレタン、ポリウレタン	
電動機能	無段階自在式 1ポイント選択タイプ 背上げ、背脚同時連動	
床面形状	通気性に優れ、体にやさしくフィットするスチールメッシュ方式 床面形状は4ブロックに分けてあります。 背上げ角度 (0° ~ 73° ± 3°) 脚上げ角度 (0° ~ 25° ± 3°)	
定格電圧	AC 100V 50/60Hz	
定格消費電力	約40W	
耐荷重	90kg	
原産国	本体: マレーシア マットレス: マレーシア 木部、モーター: 中国	

※マットレスはPSB-798LBS/BCSのみ付属します。



株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目8-28

'06.6月 作成

保証書

商品名	電動1モーターベッド
型式	PSB-798LB/LBS/BC/BCS
保証期間	お買い上げ日より1年間
*お買い上げ日	年 月 日
お客様	住所
	お名前
	電話番号
*販売店	

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ず記入の有無をご確認ください。
本書は、本書記載内容に基づき、無料修理を行なうことをお約束するものです。
※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

【無料修理規定】

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合のみ無料修理致します。
- 保証期間内に故障して修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。
その際には、必ず本書をご提示ください。但し、出張修理の場合は別途費用がかかります。
- 保証期間内でも以下の場合には有料になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示が無い場合。
 - (ヘ) 本書に、お買い上げ年月日・販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件の基において無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店が弊社までお問い合わせください。

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目8-28
TEL : 092-584-3434

補 足 説 明 書

この度は、「電動1モーターベッド、PSB-798LBS-D/BCS-D及びBCS-D/BC-D」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
取扱説明書に一部追加がございます。
本製品をご使用の際は、取扱説明書と本書をご覧になって使用してください。
ご不明な点がございましたら、下記フリーダイヤルまでご連絡くださいますようお願い致します。

5ページ 部品の確認



リモコン

※リモコンの使用方法は取扱説明書を参考にご使用下さい。

14ページ 商品の仕様

- ・本体：ベトナム
- ・リモコン：OKIN社製（中国）

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目8-28

フリーダイヤル：0120-77-3433