




自立支援ベッド

ビカム Jr.

PZB-11/W

取扱説明書

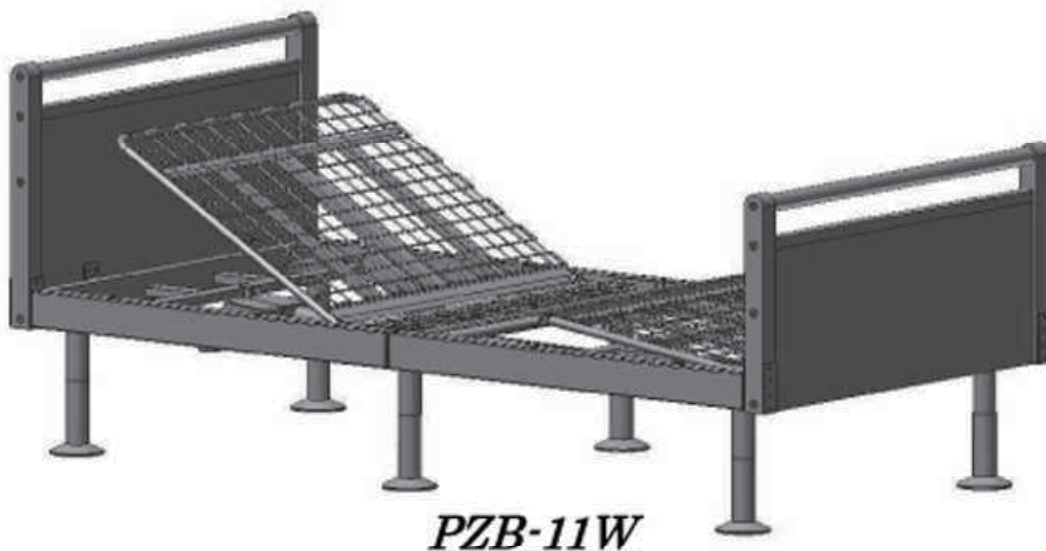

この度は、自立支援ベッド「ビカムJr.」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


この取扱説明書は、組み立て及びご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- 介護が必要な方がお使いになる場合には、介護する方もこの説明書を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を他の人に譲渡される場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- この製品は改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。予めご了承ください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

株式会社 **プラッツ**

この製品は、自立をサポートするベッドです。

- 手元スイッチのボタンを押すだけで背70°、ひざ22°までリクライニングできます。
- ひざ上げ用ワイヤーの取り付け位置にて、0°へも変更可能です。
- 延長脚により、床面高さを2段階（22/36cm）に調節することができます。

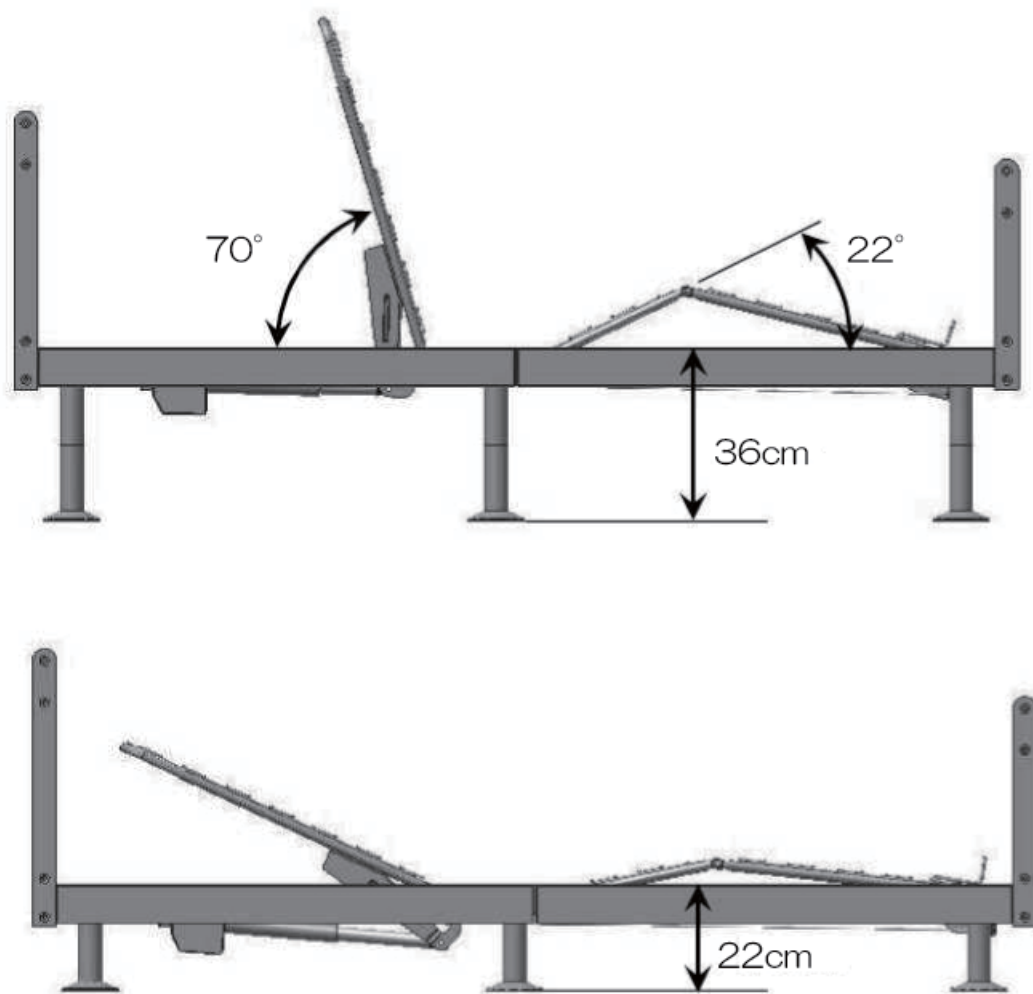

- 安全にご使用いただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3~6
- 部品の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7~8
- 主要部品の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9
- ベッドの組立方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10~13
- 故障かな！？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14
- お手入れについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14
- 保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.15
- 適合周辺機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.16~17
- 製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.18

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するための注意事項です。

ご使用の前によくお読みいただき、内容を良く理解してから正しくご使用ください。



警告

この表示の欄は、死亡する可能性または重症を負う可能性が想定される内容を記載しています。



注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容を記載しています。

【絵表示の意味】



このような記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような記号は、必ず守っていただきたい「強制」の内容です。



このような記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



警告

幼児や体の不自由な方、意思表示が出来ない方には、手元スイッチの操作をさせないでください。



操作ミスは大きな事故の原因になります。
操作する場合は、付き添いの方が操作してください。

手元スイッチの操作は、必ずベッドに寝た状態で行ってください。



ベッドに立った状態や座った状態での操作はけがをす
る恐れがあり危険です。

サイドレールを取付けてご使用の際に、体の一部（頭・腕・足）をサイドレールから出した状態で、背・ひざ上げ操作をしないでください。



禁 止

ペースメーカーをご使用の方、電子機器による治療を行っておられる方はベッドの通常使用には支障をきたしませんが、心臓部をモータに近づけるような事はしないで下さい。



 警告

2人以上で使用しないでください。



禁止

この製品は一人での使用の設計になっております。2人以上で使用するとベッドの破損は事故の原因になります。

ベッドの下に潜り込んだり、手や足を入れないでください。



禁止

けがや事故の原因になります。

電源プラグは濡れた手でさわらないでください。



ぬれ手禁止



感電する恐れがあります。

ストーブなどの火気類をベッドに近づけ過ぎないでください。1.5m以上はなして使用してください。




禁止

火災の原因になります。

配線器具の定格を超える使い方や、表示された電圧（AC100V）以外の電圧では使用しないでください。



禁止

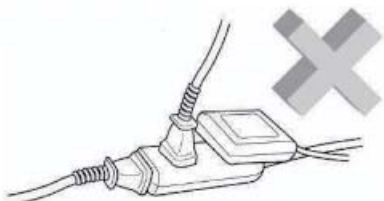

感電する恐れがあります。

ご使用になる前に、各部のボルトが完全に固定されているか確認してください。



ボルトが緩んでいると、使用中にパーツが外れる可能性があります。事故の原因になります。

水などの液体をこぼさないでください。



リモコンやモータ、電源プラグを濡らすとショートして火災や感電の原因になります。

ベッドに腰かけた状態・うつ伏せに寝た状態での操作はしないでください。



禁止

事故やけがの原因になります。

 警告

分解・改造はしないでください。



分解禁止

故障や感電の原因になります。

最大使用者体重（90kg）を必ず守ってください。



ベッドの破損や事故の原因になります。

 注意

ベッドの上で飛び跳ねないでください。



禁止

ベッドの破損や事故の原因になります。

ベッドの下にものを置かないでください。



禁止

ものが挟まり、破損する可能性があります。

電源コードを抜くときは電源プラグ部分を持って抜いてください。



コードが切断したり、モータ故障の原因になります。

電源コード類を引っばったり、挟んだりしないでください。



禁止

コードが切断したり、モータ故障の原因になります。



ベッドの操作をするときはフレームとボトムの間などで指をはさまないように注意してください。



注意

ベッドの操作の際は十分に注意してください。

体の不自由な方がお使いになる場合はなるべくサイドレールを取り付けてからお使いください。



注意

転落や事故の発生を未然に防いでください。

モータの長時間使用は（2分以上）はしないでください。



禁止

モータが加熱し故障の原因になります。

他社製品とは組み合わせないでください。




ベッドの破損や事故の原因になります。

部品の確認

開梱した時点で部品がすべてそろっているか、破損していないか確認してください。
万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

梱包（1/3）頭側フレーム

◇頭側フレーム

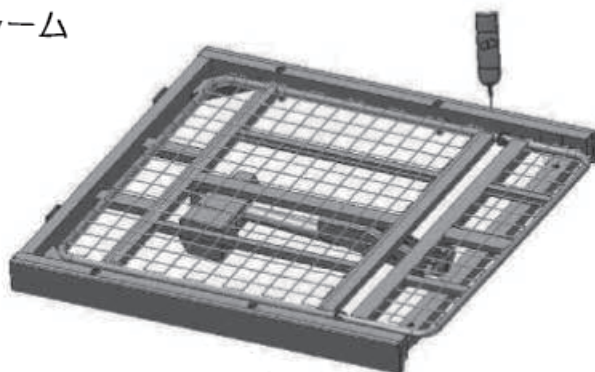

◇高さ調節用14cm延長脚×8



◇コの字ピン ×2



◇脚座×4




◇取扱説明書 ×1

◇保証書 ×1

梱包（2/3）脚側フレーム

◇脚側フレーム

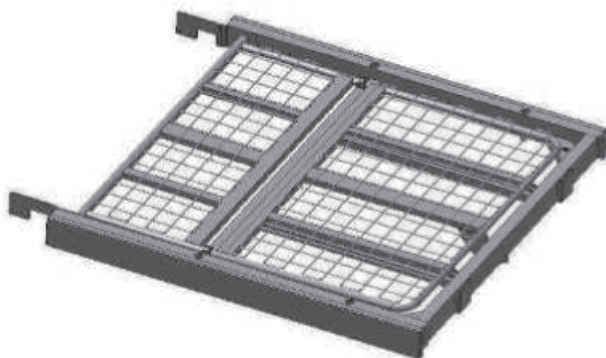

◇高さ調節用14cm延長脚×4



◇脚座×2




◇マットレス止め×1



梱包 (3/3) ヘッドボード・フットボード

◇ヘッドボード、フットボード 各×1

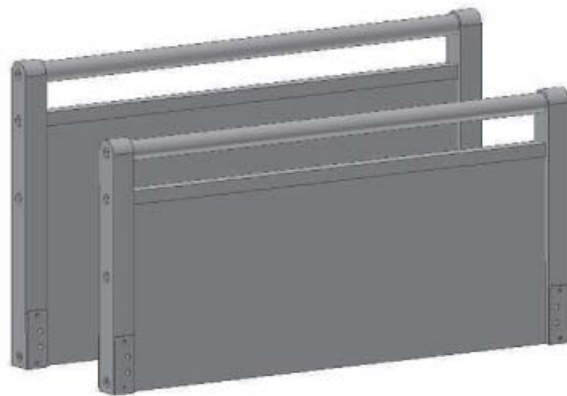


◇ボルト、ワッシャー 各×8



◇六角レンチ ×1



主要部分の名称

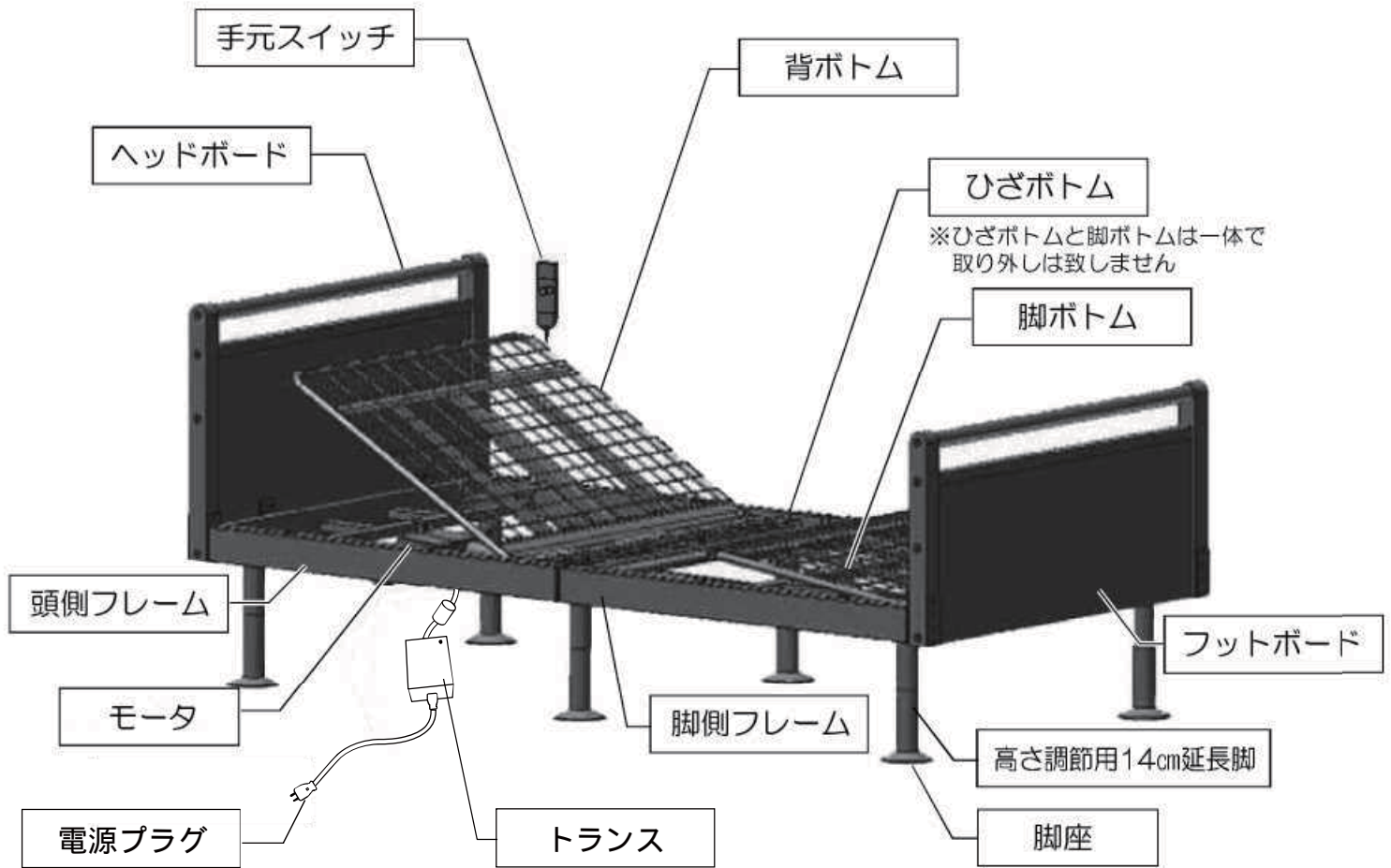

ベッドの組立方法

必ず水平な場所に設置してください。

ベッドの重量は約65kgです。さらに使用される方の体重とオプション（周辺機器）を加えた重さが総重量になります。この荷重に十分に耐えられる場所へ設置ください。
（最大使用者体重は90kg）



注意


組立の際に、手や指を挟まないようにご注意ください。

1

頭側フレームを準備します。

梱包 (1/3)

高さ調節用14cm延長脚を2本と脚座を1個連結し、頭側フレームに取り付けます。（4ヶ所）
※床面高さを22cmとする場合には延長脚1本のみを脚座に連結し、頭側フレームに取り付けます。

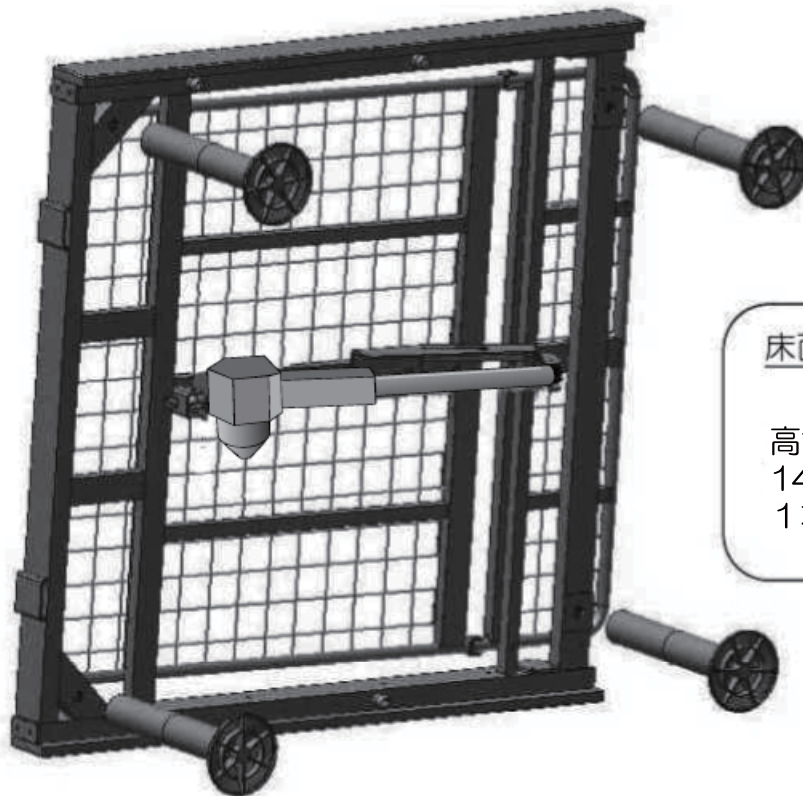

床面高さを22cmにする場合

高さ調節用
14cm延長脚を
1本使用します



確認

延長脚と脚座が、フレームにしっかりとねじ込まれているかを確認してください。

ベッドの組立方法

2

脚側フレームを準備します。


梱包 (2/3)

高さ調節用14cm延長脚を2本と脚座を1個連結し、脚側フレームに取り付けます。(2ヶ所)
※床面高さを22cmとする場合には延長脚1本のみを脚座に連結し、脚側フレームに取り付けます。



床面高さを22cmにする場合

高さ調節用
14cm延長脚を
1本使用します

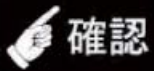

確認

延長脚と脚座が、脚側フレームにしっかりとねじ込まれているかを確認してください。



3

頭側フレームと脚側フレームを接続します。
図のように頭側フレームのパイプに脚側フレームのプレートの凹部分をひっかけます。




確認

頭側フレームと脚側フレームの高さが揃っているか確認してください。

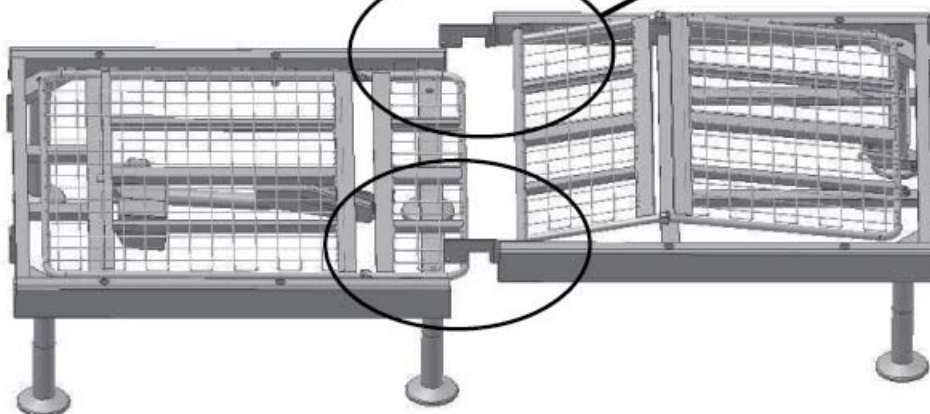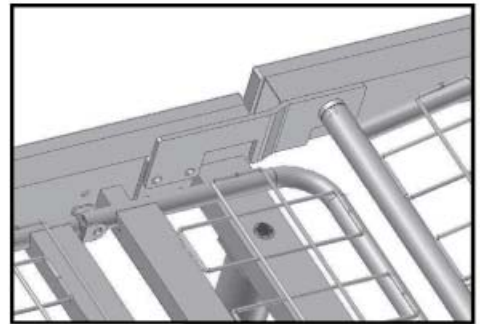

ベッドの組立方法


- 4 頭側フレームと脚側フレームを固定するために付属のコの字ピンを挿入します。図の位置にコの字ピンを挿入してください。（床面の下側から手をまわし挿入してください。）

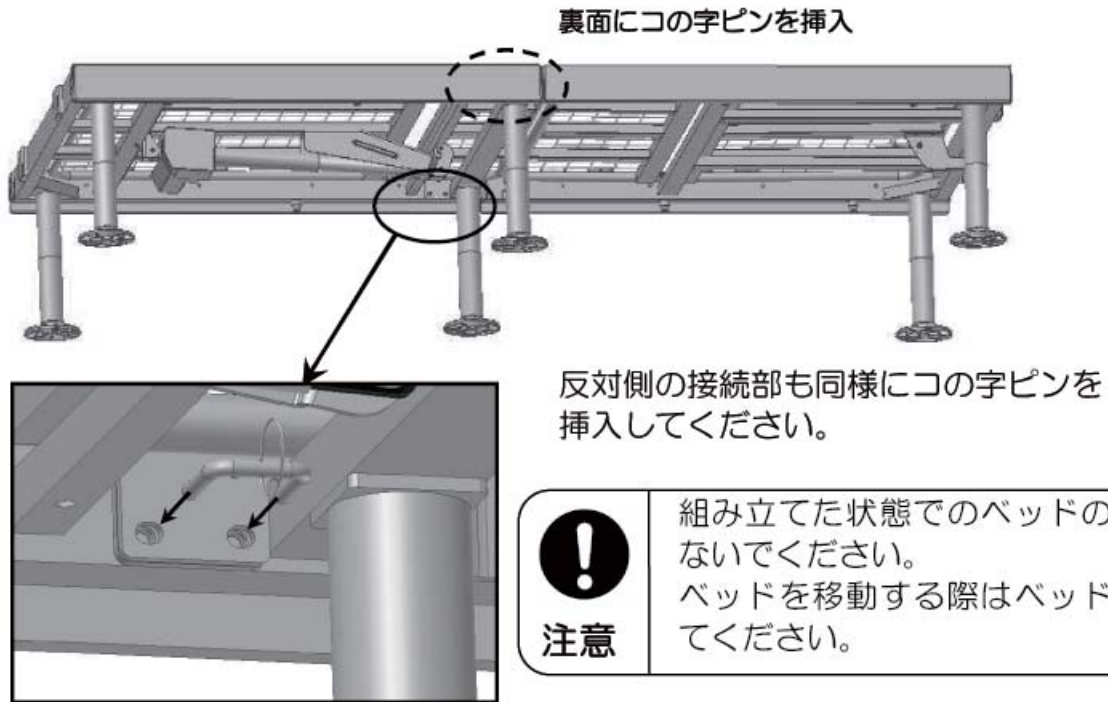


確認

コの字ピンの磁石が完全に本体の金属部分にくっついたことを確認してください。

- 5 脚側フレームの脚ボトムを背ボトムとワイヤーで連結します。ワイヤー先端の穴を脚ボトム裏にあるネジに通し、しっかりとめます。

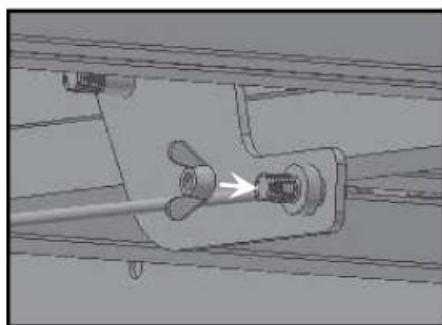

脚ボトム角度22°の場合

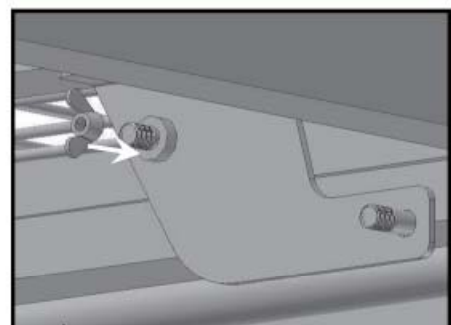


脚ボトム角度0°の場合




ベッドの組立方法

- 6 頭側フレーム、脚側フレームそれぞれにヘッドボード・フットボードを取り付けます。
ヘッドボードの爪部（図参照）を頭側本体の受け部にひっかけます（2箇所）。
フットボードも同様に脚側本体にひっかけます。

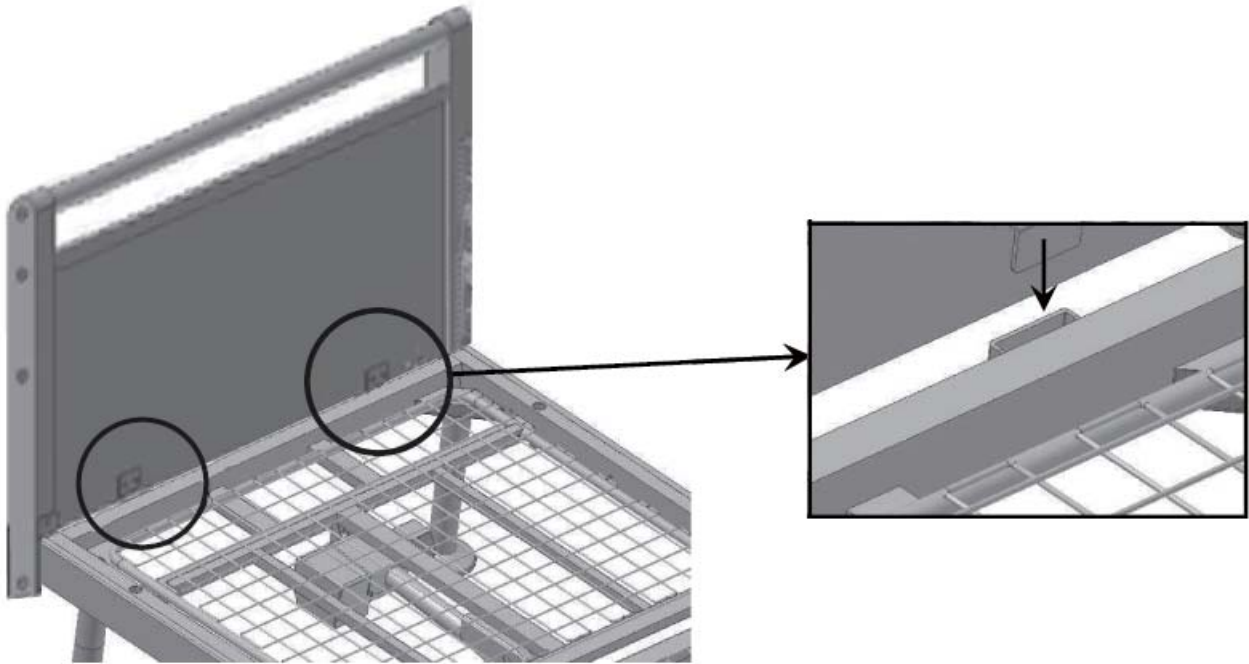

- 7 頭側フレーム、脚側フレームそれぞれにヘッドボード・フットボードをネジ固定します。
ヘッドボードを頭側フレームに付属のネジ、ワッシャーにて固定します。（4箇所）
フットボードも同様に脚側フレームにネジ固定します。（4箇所）
ネジを回す際は付属の六角レンチをお使いください。

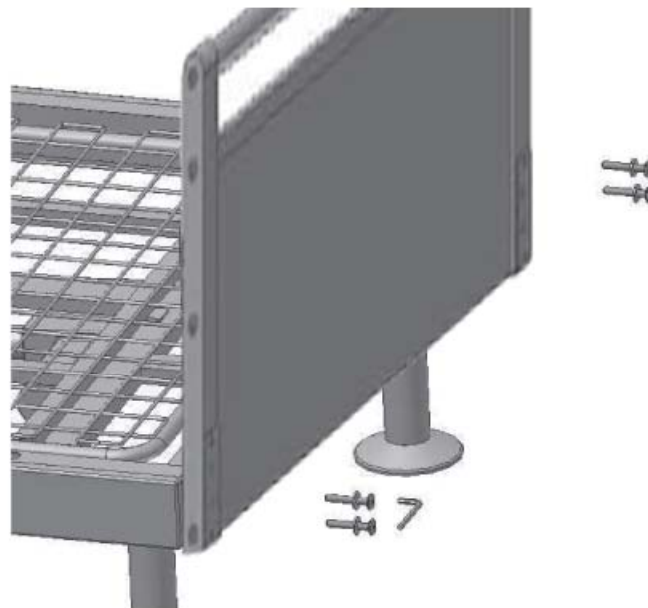

これでベッドは完成です。電源プラグをしっかりとコンセントに差込み、手元スイッチにて操作し使用してください。




故障かな・・・？

故障かな?と思われる場合、まず下記の項目に従って確認してください。

症状	確認項目	対処方法
作動しない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	・電源プラグをコンセントにさしこんでください
	・手元スイッチコード、モーターコードがトランスから抜けていませんか？	・抜けているコードをトランスにさしこんでください
	・コード類が破損していませんか？	・交換する必要があります
	・配線器具（延長コード等）をご使用の場合、その配線器具が故障していませんか？	・故障していた場合は、壁に設置されているコンセントに電源コードをさしこんでください
	・停電していませんか？ ・ブレーカーがとんでいませんか？	
異常音が出ている	・可動部に異物が挟まっていませんか？	・異物を取除いてください
	・モーター、トランスから異常音がする	・交換する必要があります

異常が直らない場合、その他異常が発生した場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

お手入れについて

 警告	 日常のお手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。誤操作による事故防止の為です。
	 水をかけないでください。 手元スイッチやモーター、電源プラグを濡らすとショートして火災や感電の原因になります。 <small>水ぬれ禁止</small>

製品が汚れた際は、石鹼水や中性洗剤を少し含ませた水を湿らせた布で拭いてください。その後乾いた布で乾拭きしてください。



お願い

ベンジン・シンナー・みがき粉・強固なたわし等は使用しないでください。
(塗装のはがれや変色の原因になります。)

保証とアフターサービス

アフターサービスを依頼される前に、取扱説明書の14ページ「故障かな・・・？」の項目に従って確認をしてください。それでも直らない場合は、お買い上げの販売店か下記フリーコールまでご連絡ください。



以下の内容をご準備頂きご連絡ください

- ・商品名及び型式
- ・故障内容（できるだけ詳しく）
- ・お買い上げ日
- ・お買い上げの販売店
- ・ご住所/お名前/お電話番号

保証書（別添付）

お買い上げ日/販売店/お名前を必ず記入し、保証書の内容をよくお読みになって大切に保管してください。

（※保証書の再発行はいたしません。なお、販売店印なきものは無効といたします。）

保証期間について

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無料で修理いたします。

ただし、保障期間内でも有料になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をごらんください。

保証期間を過ぎている場合

修理及び部品にて対応可能であれば、有料にて修理いたします。

修理代について

修理代は、部品料/出張基本料/技術料で構成されます。

- 部品料・・・修理で使用した部品代です。
- 出張基本料・・・お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張の際に発生する費用です。
- 技術料・・・製品の診断・故障箇所の修理等の作業にかかる費用です。

補修部品の保有期間

弊社では、このベッドの補修部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

プラッツネットワーク

■本 社	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑2丁目8-28	TEL:092-584-3434
■関東支店	〒105-0014	東京都港区芝2丁目16-9-4F	TEL:03-5427-8033
■東海支店	〒485-0082	愛知県小牧市村中足中代927	TEL:0568-42-0588
■関西支店	〒541-0046	大阪府大阪市中央区平野町4-6-4-2F	TEL:06-6233-2105
■九州支店	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑2丁目8-28（本社内）	TEL:092-584-3433

適合周辺機器

別売部品

安全にご使用いただくために、弊社の適合周辺機器をお使いになることをお勧めします。
他社製品を合わせてご使用になって不具合が発生した場合、保証の対象外になることがあります。


サイドレール (78cm 幅)

BG-500VN




サイドレール (97cm 幅)

BG-1000V

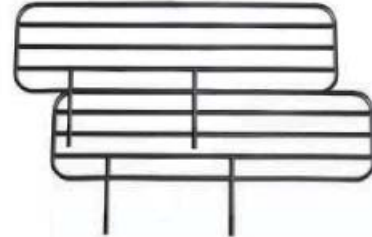


サイドレール (74.5cm 幅)

BG-500VS

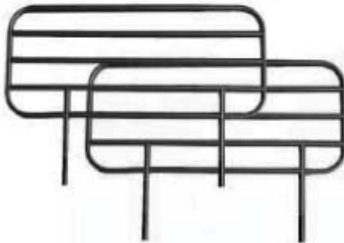

サイドレール (60cm幅)

BG-350V

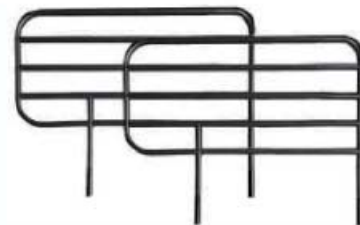

木付サイドレール (78cm 幅)

BGM-500V3



木付サイドレール (73.5cm 幅)

BGM-305




オーバーテーブル

PGT-400L



スイングアーム付きベッド用グリップ

PZR-K950B

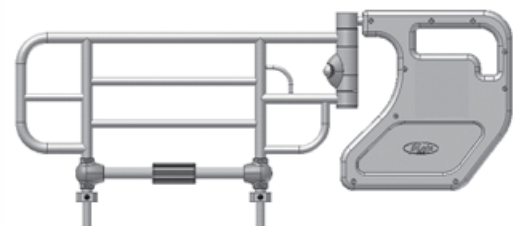

高さ調節用延長脚（各6個組）



高さ調節用14cm延長脚（6個組）



高さ調節用7cm延長脚（6個組）



高さ調節用3.5cm延長脚（6個組）

高さ調節用延長脚により、22cmから36cmまでベッドの高さを調節できます



注意

安全にご使用いただくために、高さ調節用延長脚の組み合わせは合計28cmを超えないようご注意ください。また、高さ調節用延長脚の組み合わせは2本までで組み合わせてご使用ください。

製品の仕様

製品の改良などにより、記載内容と一部異なる場合があります。予めご了承ください。

型 式		PZB-11W
寸 法	全 長	208 cm
	全 幅	100 cm
	全 高	71.5/85.5 cm
	床面高	22/36 cm
製 品 質 量		65.4 kg
	頭側フレーム	29.7 kg
	脚側フレーム	22.2 kg
	ヘッド・フット	13.5 kg
梱包 サイズ	頭側フレーム	1115×1085×160 mm
	脚側フレーム	1195×1115×130 mm
	ヘッド・フット	1105×685×130 mm
材 質	フレーム	スチール
	ヘッド ・フットボード	天然木 MDF
電 動 機 能		背・ひざ連動 背上げ：0° ~ 70° ひざ上げ：0° ~ 22°
モーター形式		Limoss 社製
	定格電圧	AC100V
	定格周波数	50/60Hz
	定格消費電力	50W
	モーターコード の長さ	約 3.9m
連続使用時間		最大2分かつ1分間に最大5回までの ON-OFF
最大使用者体重		90 kg



株式会社 **フラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目8-28

'09. 5月 改訂

'09. 5-2