

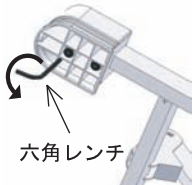
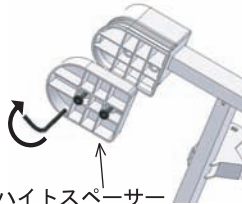
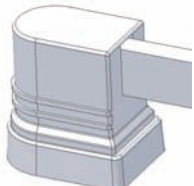
この度は、Miolet ハイトスペーサーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用いただきますよう、よろしくお願いたします。  
 なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。  
 不足部品が無いが、梱包内容をお確かめください。

### ●梱包内容


 ハイトスペーサー : 4 個	 ボルト (M12XL88mm) : 8 本	 六角レンチ (8mm) : 1 本
	 保証書 : 1 枚	 取扱説明書 (本書) : 1 枚

### ●ハイトスペーサーの取り付け方

※必ず、昇降ユニットのみの状態で取り付けをおこなってください。

<p>①</p>  <p>六角レンチ</p> <p>付属の六角レンチで ボルトを 2 本外します。</p>	<p>②</p>  <p>ハイトスペーサー</p> <p>下からハイトスペーサー をはめて、付属のボルト 2 本を確実に締めてください。</p>
<p>③</p>  <p>同様に、4 箇所 に取り付けをおこなっ てください。</p>	

※①で取り外したボルトは大切に保管してください。

 <b>警告</b>
ハイトスペーサーを取り付けの際は、ベッドを組み立てた状態でおこなわないでください。また、昇降ユニットを立てて取り付ける場合は昇降ユニットが倒れないように注意してください。
ハイトスペーサーを取り付け後、ベッドを水平なところに置き、ぐらつきがないことを確認したうえでご使用ください。
ハイトスペーサー、ボルトの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検してください。

### ○点検 / お手入れ

- ・ハイトスペーサー、ボルトの取り付けが確実かどうか定期的に必ず点検をしてください。
- ・乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- ・製品に水を散らしたり、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、ご使用しないでください。

○商品に関してのお問い合わせは  
 下記フリーコールまでご連絡ください。


0120-77-3433  
《平日 午前9時～午後5時》

**株式会社 フラッツ**

〒816-0921  
 福岡県大野城市仲畑 2 丁目 8-28

09.4 月作成