

# 取扱説明書

## ニーパロ専用 安心ひざパッド 「ニーパロ・パッド」

## PZRHP-AT116J


この度は、ニーパロ・パッドPZRHP-AT116Jをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。


**特徴** ●安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」は、ベッドと車いすやポータブルトイレ間との移乗を、より「安全・安心」「スムーズ」に行うことができるベッド用グリップ「ニーパロ」の専用オプションです。

**ご注意** 「ニーパロ・パッド」は消耗品です。  
※パッド部分は、取り外し、上下を入れ替えて使用する事ができます。

### ■自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」 PZR-AT116J

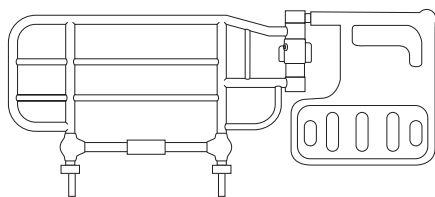


### ■安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」 PZRHP-AT116J

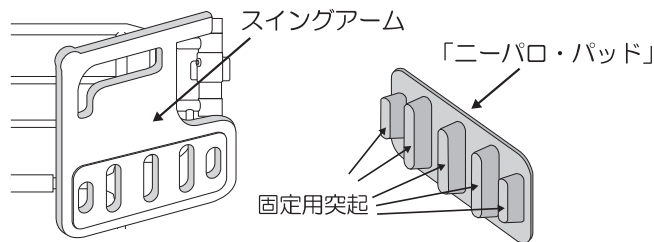


スイングアームの5つの穴に安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」の固定用突起を入れ固定してください

### ■安心ひざパッド装着時

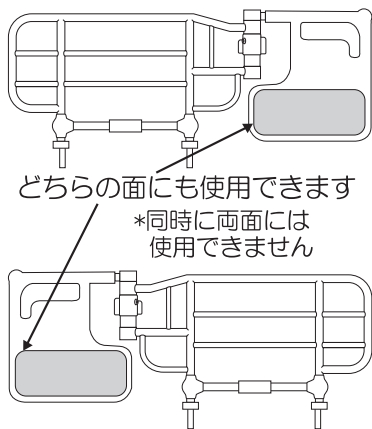

どちらの面にも使用できます  
\*同時に両面には使用できません

### ■安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」使用例

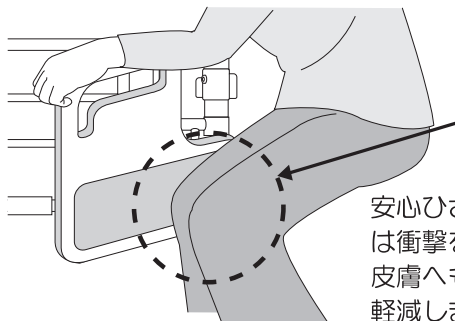

イラストのように「ニーパロ・パッド」にひざをあてて使用します

安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」は衝撃を吸収する素材を使っており、皮膚へも優しく、ひざへの負担を軽減します

### 仕様

商品名	ニーパロ専用 安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」
型式	PZRHP-AT116J (適合機種：PZR-AT116J専用)
長さ×幅×厚さ	350×130×33mm
材料	EVA
原産国	ベトナム