



取扱説明書

ビカムポイントマットレス


PD502-BP8914

この度は、ビカムポイントマットレスPD502-BP8914をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

警告 この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用グリップと使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

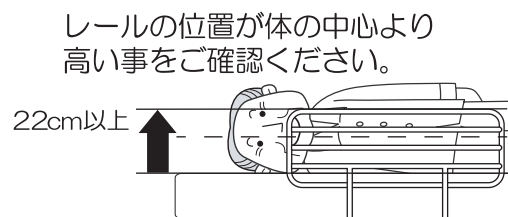

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・中身やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転倒事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
 - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

特徴

- 3次元カッティング工法により、体圧を効果的に分散しながら、熱のこもりを防ぎます。
- 側面から10cmに高密度ウレタンフォームを採用し、端座位をとりやすくしています。
- ムレにくい清拭タイプの透湿防水カバーを採用しています。
- ファスナーは裏面、さらにマットレスの端から内側に取り付ける事により、失禁や水こぼし等の浸み込みを防ぎます。
- 裏面はカビが発生しにくいように、通気性の良いポリエステル生地を採用しています。

使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。
- ロゴが脚側（フットボード側）に来るようにマットレスを敷いてお使いください。
- ロゴがある方が表面です。裏返して使用しないでください。

お手入れ

外カバーの洗濯時の注意

- ドライクリーニング・乾燥機は表面のポリウレタンラミネートを傷めますので使用しないでください。
- タンブラーでの乾燥はポリウレタンラミネートが剥がれたり、破れたりする恐れがありますので避けてください。
- アイロンは絶対に避けてください。
- 洗濯機による洗濯は避けてください。
防水性が高いため水が抜けず、洗濯機転倒等の危険性があります。



洗濯機は使用できません




塩素漂白剤での漂白はできません



アイロン掛けはできません



ドライクリーニングはできません

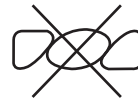

絞らないでください



日陰でつり干してください

仕様

商品名	ビカムポイントマットレス
型式	PD502-BP8914
寸法：厚さ×幅×長さ	厚さ14.0cm×幅89.0cm×長さ192.0cm (厚さ140mm×幅890mm×長さ1920mm)
商品質量	10.5kg
硬さ	155.0ニュートン（かため）
復元率	97.5パーセント
構造	平形
材料	ウレタンフォーム
外装生地組成	外カバー：ポリウレタンラミネート、ポリエステル 内カバー：ポリエステル
原産国	日本

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目8-39

製品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



0120-77-3433

フリーアクセス
携帯・PHS・OK

《平日 午前9時～午後5時》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

12.05月作成

TS120512