

取扱説明書

ダブルポイントマットレス
PFMシリーズ


PFM-9780PN PFM-8380N
PFM-8980PN

この度は、ダブルポイントマットレスPFMシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- この製品は、改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

警告 この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用手すりと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないで下さい。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

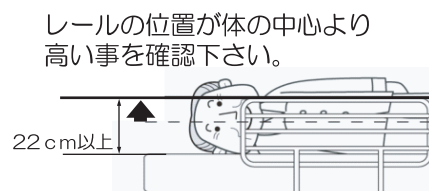

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないで下さい。
 - ・中身やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転倒事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないで下さい。
 - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 直射日光を長時間当てると変色する恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離して下さい。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないで下さい。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

特徴

- 通気性、通水性に優れたポリエステルマットです。
- 青森ヒバのコーティングにより、制菌、防ダニ効果があります。
- 2層構造により2つの寝心地を選べます。

使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使い下さい。
- 2層構造により、硬い面/柔らかい面がありますので、お好きな寝心地の方をお選び下さい。
硬い面の中身に縦線3本のマークがあります。(外カバーを開けると確認できます)
- マットレスの上には、ベッドパットやシーツを敷いてご使用下さい。
- 定期的に裏返したり、頭足方向を変えることで、硬化を抑え長持ちさせることができます。

お手入れ

- カビの発生や悪臭の発生を抑えるには
 - 1.定期的に窓を開け室内の通気・換気を行って下さい。
 - 2.天気の良い日は定期的に日陰に干して下さい。
 - 3.外カバー、メッシュ地の内カバーは外して洗濯が可能ですが、内カバーを外すと洗濯後に中身を入れる際に入れにくい状況になりますので、通常は外カバーのみ洗濯される事をお薦めします。

- 洗濯時の注意（マットタグの説明）



液温は40℃までで、洗濯機の弱水流による洗濯ができます



アイロンは120度を限度として、低い温度でかけてください



塩素漂白剤での漂白はできません

- 血液、尿等の汚れが付着した場合、外カバーを外しメッシュ地と共にシャワーをかけるなど部分洗いをお薦めします。
 - ダニを寄せ付けない特殊加工を行っていますが、ダニが発生した場合は、外カバーを洗濯し、メッシュ地の内カバーは付けたまま、マット全面に掃除機をかけて下さい。また、直射日光に30分程度あてた後、全面をもう一度掃除機で吸う事で、更に効果があります。
- 注：直射日光に当てると変色する可能性があります。

仕様

商品名	ダブルポイントマットレス		
型式	PFM-9780PN	PFM-8980PN	PFM-8380PN
寸法 長さ×幅×高さ	長さ1910×幅970×高さ80mm	長さ1910×幅900×高さ80mm	長さ1910×幅830×高さ80mm
質量	8.0kg	7.5kg	7.0kg
材料	ポリエステル100%		
外装生地 of 組成	外カバー：ポリエステル100%、難燃加工、制菌加工		
	内カバー：ポリエステル100%		
原産国	日本		

製品についてのお問合せは下記フリーコールまでご連絡下さい。



0120-77-3433

携帯・PHS・OK

《平日 午前9時～午後5時》(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

プラッツネットワーク

■本社	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑2丁目8-28	TEL:092-584-3434
■関東支店	〒105-0014	東京都港区芝2丁目16-9	TEL:03-5427-8033
■東海支店	〒485-0082	愛知県小牧市村中足中代927	TEL:0568-42-0588
■関西支店	〒541-0046	大阪府大阪市中央区平野町4-6-4-2F	TEL:06-6233-2105
■九州支店	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑2丁目8-28 (本社内)	TEL:092-584-3433

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目8-28

'10.3月作成

TS100301