

# 在宅介護ベッド「ミオレット・フォーユー」の

## 停電時の背下げ操作方法

停電時に背ボトムを手動で下げる方法です。


※作業時は、ご利用様は必ずベッドから降りていただき、作業を行ってください。

※電源プラグはコンセントから抜いてください。

※危険防止のため、作業は2人以上で行ってください。

- ①ご利用様と寝具を  
ベッドから降ろします


- ②背ボトムを手で上げて  
ください  
作業は背ボトムを手で  
支えて行ってください

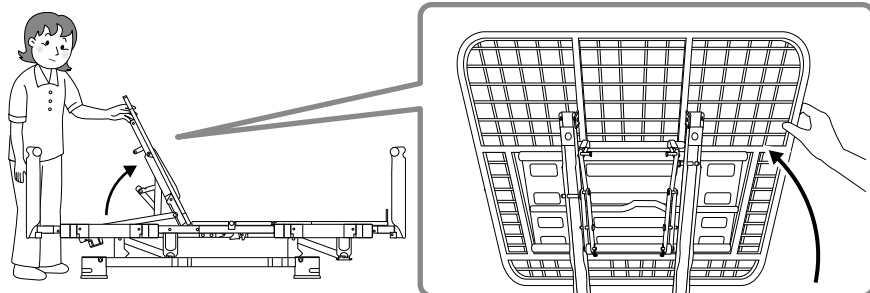

- ③背上げモーター先端の  
割りピンとピンを  
外してください

ピン先端の穴から  
割りピンを抜きます

モーターから  
ピンを抜きます

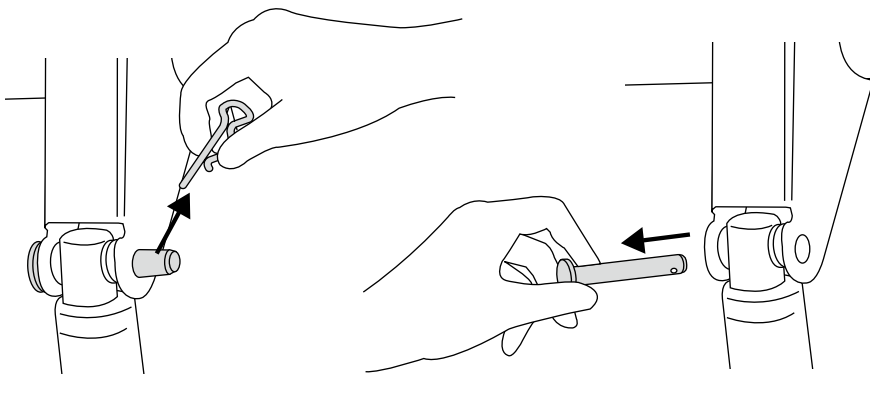


ここを支えながら  
ピンを  
外してください

**⚠ 警告**


危険防止のため  
作業は2人以上で  
行ってください

## 停電時の背下げ操作方法


- ④ 背上げモーター先端を下ろしてください

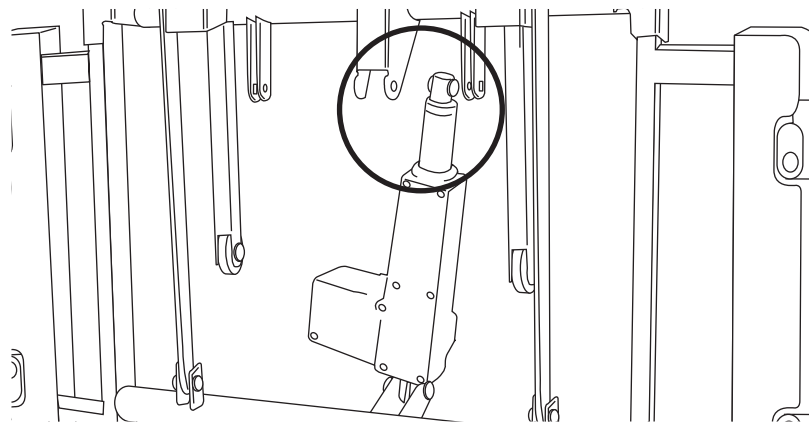


- ⑤ 背上げモーター根元側のピンと割りピンを抜いてください

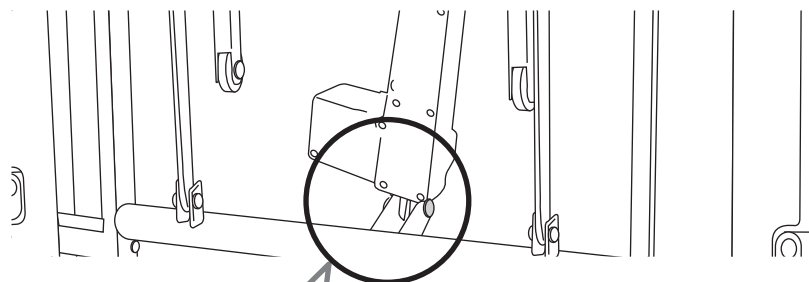

- ⑥ 背上げモーターを  
ヘッドフレームから  
外します

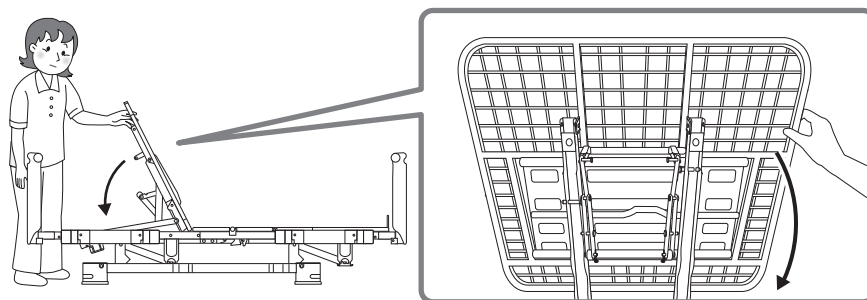

- ⑦ 背ボトムを下ろします

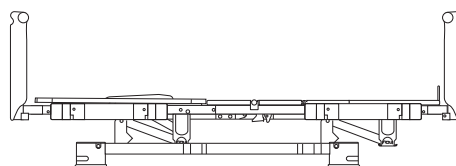

### ⚠ 警告

危険防止のため  
作業は2人以上で  
行ってください

電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください  
外した割りピンとピンは、背ボトムを元に戻す際に使用しますので  
保管しておいてください