


# 緊急時の背下げ方法

※作業時は、必ずご利用様はベッドから降りていただき作業を行ってください。  
 ※プラグはコンセントから抜いてください。 ※危険防止のため、作業は2人で行ってください。

①ご利用様と寝具をベッドから降ろし、作業は背ボトムを手で支えて行ってください。

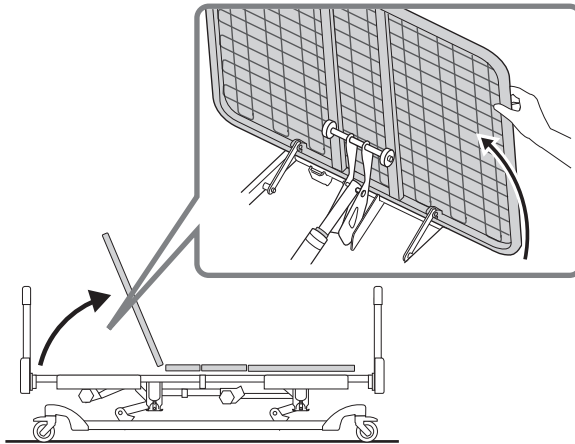

**警告**


安全のため作業は2人以上で行ってください

②背上げモーター先端のピンを外してください。


ピン先端の穴から割りピンを抜きます





モーターからピンを抜きます

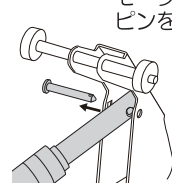

ここを支えながらピンを外してください

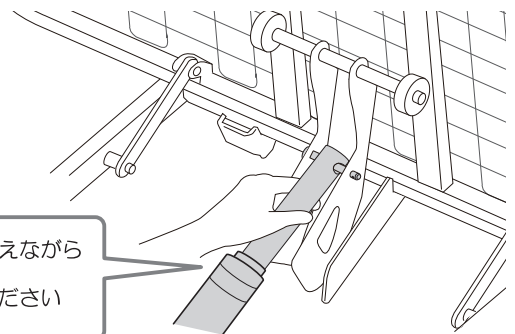


③背上げモーター根元側のピンと割りピンを抜いてください

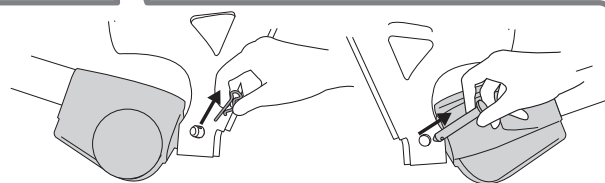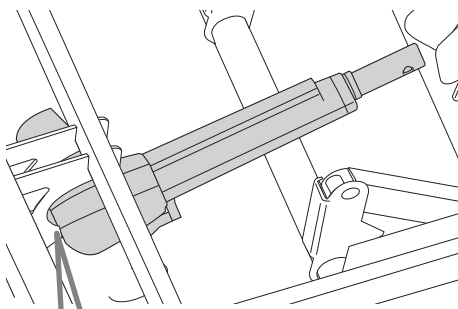

ピン先端の穴から抜け止めピンを抜きます

ピンを抜きます

④背上げモーターをヘッドフレームから外します  
 ⑤背ボトムを下ろします

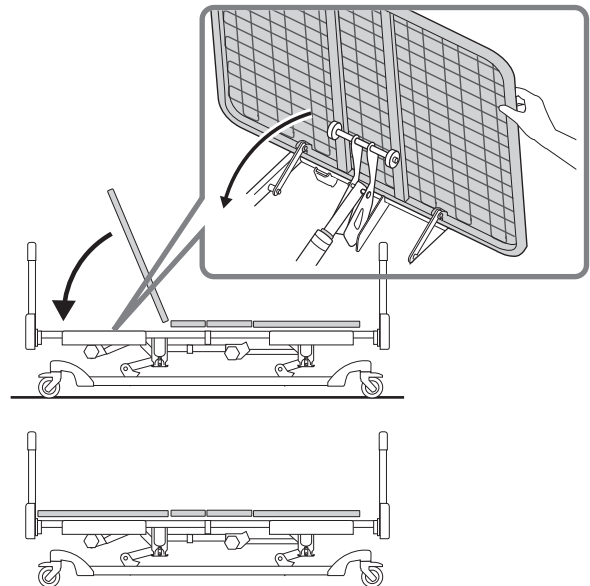

電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください。  
 外した割りピンとピンは背ボトムを元に戻す際に使用しますので、保管しておいてください。  
 ※停電時はオプションのバッテリーを使用して、背下げをおこなうことができます。