




停電時の背下げ操作方法

※作業時は、必ずご利用様はベッドから降りていただき作業を行ってください。
※プラグはコンセントから抜いてください。※危険防止のため、作業は2人以上で行ってください。

①ご利用様と寝具をベッドから降ろし、作業は背ボトムを手で支えて行ってください。

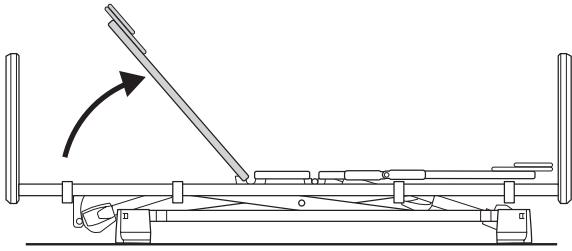



②背上げモーター先端のピンを外してください。

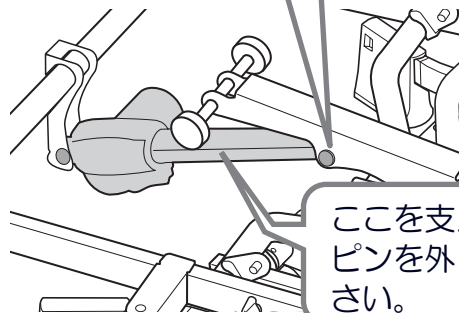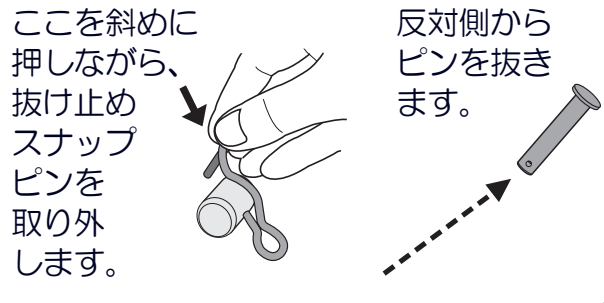

警告



安全のため作業は2人以上で行ってください。

③背上げモーター根元側の抜け止めスナップピンとピンを抜いてください。

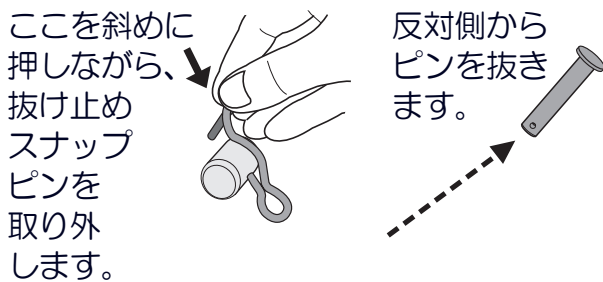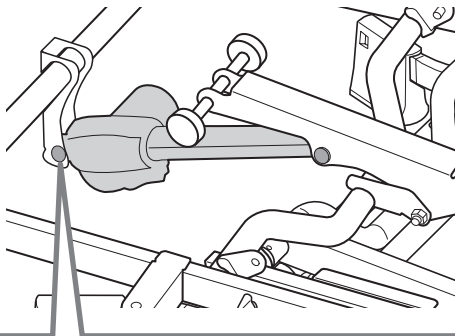

④背上げモーターをヘッドフレームから外します。

⑤背ボトムを下ろします。

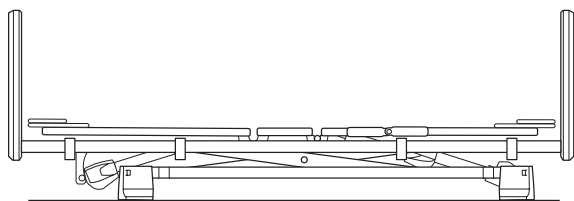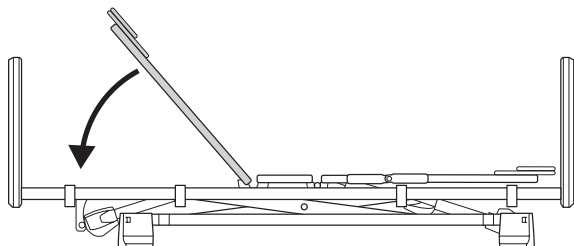

電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください。
外した抜け止めスナップピンとピンは背ボトムを元に戻す際に使用しますので、保管しておいてください。
※停電時はオプションのバッテリーを使用して、背下げをおこなうことができます。