


## 停電時の背下げ方法

※作業時は、必ずご利用者様はベッドから降りていただき作業をおこなってください。  
 ※電源プラグはコンセントから抜いてください。※危険防止のため、作業は2人以上でおこなってください。


①寝具をベッドから降ろし、作業は背ボトムを手で支えておこなってください。

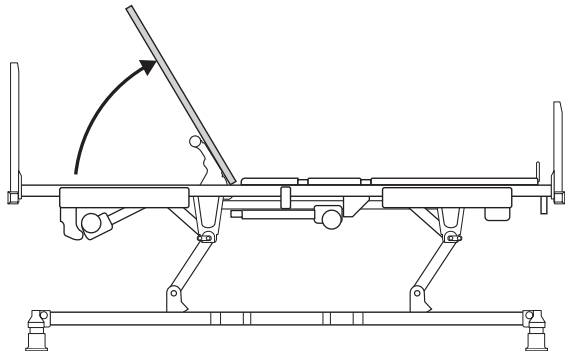

②背上げモーター先端のピンを外してください。


ピン先端の穴から抜け止めピンを抜きます。

モーターからピンを抜きます。


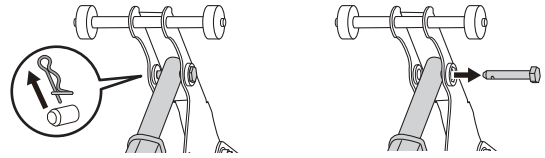


ここを支えながらピンを外してください。


背上げモーターの先端を下げてください。

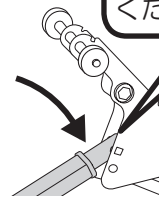

③背上げモーター根元側のピンと抜け止めピンを外してください。

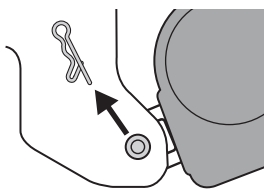
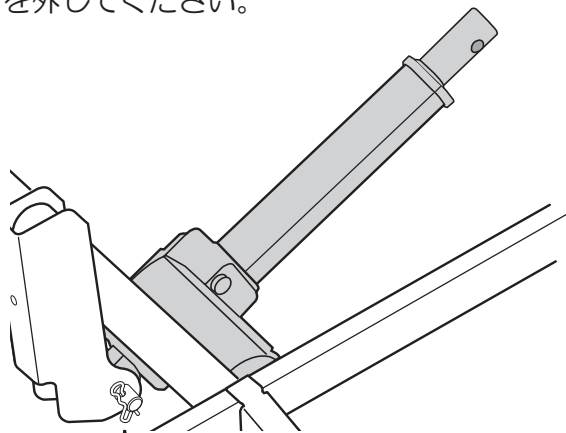


ピン先端の穴から抜け止めピンを抜きます。

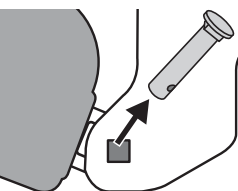

ピンを抜きます。

④背上げモーターをベッドフレームから外します。  
 ⑤背ボトムを下ろします。

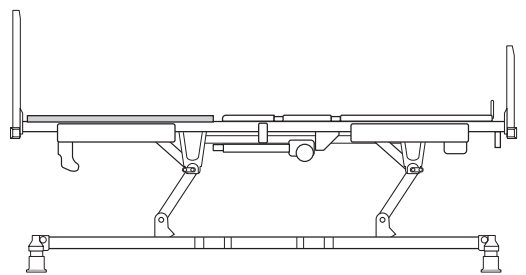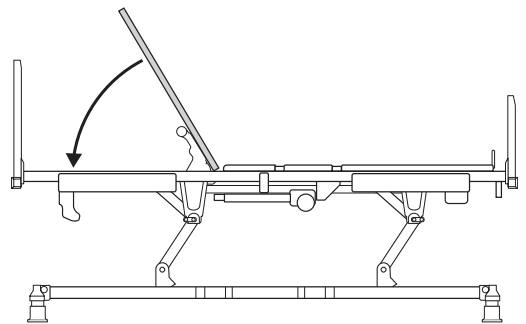

電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください。  
 外した割りピンとピンは背ボトムを元に戻す際に使用しますので、保管しておいてください。